

au CA006 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	CA006

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[Bluetooth/赤外線]→[1 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

STEP 2 「Bluetoothメニュー」の一覧から、[2 新規登録]を選択。

「Bluetoothメニュー」の一覧から、[2 新規登録]を選択。※画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が登録待機状態かご確認ください」と書かれた画面が表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して、[OK]を選択。

STEP 3 一覧から、<Hearing Aid Phone>を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ち下さい」と表示された後、画面上部に「機器選択 ○件」と書かれた画面に変わるので、一覧から、<Hearing Aid Phone>を選択。

STEP 4 画面の右上方にBluetoothアイコンが表示され、設定完了。

画面中央に「<Hearing Aid Phone>に接続中です」と表示された後、「<Hearing Aid Phone> 認証処理中」→「<Hearing Aid Phone>に接続しました A2DP/HFPがご利用になれます」の順に切り替わり、画面の右上方にBluetoothアイコンが表示されたら、設定は完了。

ペ어링した機器の
確認方法

Bluetoothメニューから[1 登録機器一覧]

Bluetooth の
オン / オフ方法

方法1：Bluetoothメニューから[3 接続待ちON/OFF]→[1 接続待ちON]または[2 接続待ちOFF]
方法2：待受画面表示中に[#]ボタンを長押し→[# 接続待ちON/OFF]

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面最上部にBluetoothのアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

[EZ]ボタン（電源ボタンの上）を押して、本体とBluetoothヘッドセットの音声を切り替え。

発信音の出力

携帯電話から聞こえる。

au G'zOne TYPE-X ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	G'zOne TYPE-X

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[Bluetooth/赤外線]→[1 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

STEP 2 「Bluetoothメニュー」の一覧から、[2 新規登録]を選択。

「Bluetoothメニュー」の一覧から、[2 新規登録]を選択。※画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が登録待機状態かご確認ください」と書かれた画面が表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して、[OK]を選択。

STEP 3 一覧から、<Hearing Aid Phone>を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ち下さい」と表示された後、画面上部に「機器選択 ○件」と書かれた画面に変わるので、一覧から、<Hearing Aid Phone>を選択。

STEP 4 画面の右上方にBluetoothアイコンが表示され、設定完了。

画面中央に「<Hearing Aid Phone>に接続中です」と表示された後、「<Hearing Aid Phone> 認証処理中」→「<Hearing Aid Phone>に接続しました A2DP/HFPがご利用になれます」の順に切り替わり、画面の右上方にBluetoothアイコンが表示されたら、設定は完了。

ペ어링した機器の
確認方法

Bluetoothメニューから[1 登録機器一覧]

Bluetooth の
オン / オフ方法

方法1：Bluetoothメニューから[3 接続待ちON/OFF]→[1 接続待ちON]または[2 接続待ちOFF]
方法2：待受画面表示中に[#]ボタンを長押し→[# 接続待ちON/OFF]

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面最上部にBluetoothのアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

[EZ]ボタン（電源ボタンの上）を押して、本体とBluetoothヘッドセットの音声を切り替え。

発信音の出力

携帯電話から聞こえる。