

au beskey ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	HITACHI beskey

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[アクセサリ]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「Bluetooth メニュー」の一覧から、[2 新規登録]を選択。

「Bluetooth メニュー」の一覧から、[2 新規登録]を選択。

STEP 3 画面が表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押すことで、[OK]を選択。

画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が登録待機状態でご確認ください」と書かれた画面が表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押すことで、[OK]を選択。

STEP 4 一覧から、ペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ちください」と表示された後、画面上部に「機器選択 ○件」と書かれた画面に変わるので、一覧から、ペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

STEP 5 パスキーを入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、[OK]を選択。

画面中央に「<ペ어링する Bluetooth 機器名>に接続中です」と表示された後、「認証処理中」と書かれた画面に切り替わる。画面下部の「パスキー入力」と書かれた入力欄に、30秒以内にパスキー「0000」を入力した後、十字キー真ん中のボタンを押すことで、[OK]を選択。※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示されない場合がある。

STEP 6 画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されたら、設定は完了。

「<ペ어링する Bluetooth 機器名>認証処理中」という表示が出た後、「<ペ어링した Bluetooth 機器名>に接続しました A2DP/HFP (※接続している機器の対応プロファイルにより表示が異なります。) がご利用になれます」という画面が表示され、画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されたら、設定は完了。

ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニューから [1 登録機器一覧]

Bluetooth の オン / オフ方法

Bluetooth メニューから [3 接続待ち ON/OFF]→オンの場合 [1 接続待ち ON]、オフの場合 [2 接続待ち OFF]

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面最上部に Bluetooth のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

[EZ] ボタン (電源ボタンの上) を押して、本体とヘッドセットの音声を切替。