

# au IS06 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	IS06

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体のメニューキー→[設定]→[システム]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]

## ペ어링方法

### STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

### STEP 2 Bluetoothメニューから[デバイスのスキャン]をタップ。

Bluetoothをオンにした状態で、Bluetoothメニューから[デバイスのスキャン]をタップ。

### STEP 3 <Hearing Aid Phone>をタップ。

画面下部の「Bluetooth端末」の下に表示された、<Hearing Aid Phone>をタップ。

### STEP 4 <Hearing Aid Phone>の下の表示が順番に切り替わり、設定完了。

<Hearing Aid Phone>の下の表示が、「ペアとして設定中...」→「ペア設定、非接続」→「接続中...」→「携帯電話とメディアの音声に接続」と順番に切り替わり、設定完了。

#### ペ어링した機器の 確認方法

「Bluetooth設定」画面下部、「Bluetooth端末」の下に表示される。

#### Bluetooth の オン / オフ方法

「無線とネットワークの設定」一覧の[Bluetooth]、またはBluetoothメニュー一覧の[Bluetooth]の右側のチェックをタップ。チェックが緑の場合、Bluetoothオンの状態。

#### Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、青いBluetoothアイコンが表示される。携帯ユナイトで通話中は、画面左上の電話マークが青色に変わっている（本体で通話中はグレー）。

#### ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

通話中に本体画面左下に表示される、[Bluetooth]をタップして切り替え。「Bluetooth」の下のバーが緑の場合に、Bluetoothから音声が出力される。

#### 発信音の出力

補聴器から聞こえる。