

# au IS03 ペ어링方法

|       |      |
|-------|------|
| 携帯会社名 | au   |
| 機種名   | IS03 |

## Bluetoothメニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体のメニューボタンを押す→[設定]→[無線とネットワーク] (タップすると、「ワイヤレスとネットワークの設定」のメニュー一覧が表示される) →[Bluetooth設定]

## ペ어링方法

**STEP 1** <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

**STEP 2** 「Bluetooth設定」の一覧から、[新規デバイス登録] をタップ。

「Bluetooth設定」の一覧から、[新規デバイス登録]をタップ。

※ 「機器探索を行います。登録機器が待機状態かご確認ください。」というポップアップが表示された場合は、[OK]をタップ。

**STEP 3** 一覧から、<Hearing Aid Phone>をタップ。

「検索中・・・〇件」→「検索結果」と切り替わり、Bluetooth機器をサーチした検索結果の一覧が表示されるので、<Hearing Aid Phone>をタップ。

**STEP 4** 「ハンズフリー機能、オーディオ機能に接続しました」に切り替わる。

「しばらくお待ちください」→「<Hearing Aid Phone>接続中・・・」→「ハンズフリー機能、オーディオ機能に接続しました」の順に切り替わる。

**STEP 5** 機器名の右下に接続したいプロフィールが表示され、設定は完了。

画面上部に「登録機器一覧」と表示された画面に切り替わり、一覧に<Hearing Aid Phone>が表示され、機器名の右下に接続したいプロフィールが表示されていれば、設定は完了。

### ペ어링した機器の確認方法

Bluetoothメニューから[登録機器一覧]

### Bluetoothのオン/オフ方法

「ワイヤレスとネットワークの設定」一覧の[Bluetooth]、または「Bluetooth設定」一覧の[Bluetooth]の右側のチェックをタップ。チェックが青の場合、Bluetoothオンの状態。

### Bluetoothとの接続を画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。

### ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

通話中に画面左下の[≡]ボタンをタップして表示されるメニューから、[Bluetooth ON (OFF)]をタップすることで、本体とBluetoothヘッドセットの音声を切り替え。

### 発信音の出力

補聴器から聞こえる。

# au IS05 ペ어링方法

|       |      |
|-------|------|
| 携帯会社名 | au   |
| 機種名   | IS05 |

## Bluetoothメニューへのたどり着き方

ホーム画面から画面左下の[三]ボタンを押す→[設定]→[無線とネットワーク] (タップすると、「ワイヤレスとネットワークの設定」のメニュー一覧が表示される) →[Bluetooth設定]

## ペ어링方法

**STEP 1** <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

**STEP 2** 「Bluetooth設定」の一覧から、[新規デバイス登録] をタップ。

「Bluetooth設定」の一覧から、[新規デバイス登録]をタップ。

※「機器探索を行います。登録機器が待機状態かご確認ください。」というポップアップが表示された場合は、[OK]をタップ。

**STEP 3** <Hearing Aid Phone>をタップ。

しばらくすると画面上部の表示が「探索中… 〇件」→「検索結果」と表示され、Bluetooth機器をサーチした検索結果の一覧が表示されるので、<Hearing Aid Phone>をタップ。

**STEP 4** 画面が順に切り替わる。

「しばらくお待ちください」→「<Hearing Aid Phone>接続中・・・」→「ハンズフリー機能、オーディオ機能に接続しました」の順に切り替わる。

**STEP 5** 機器名の右下に接続したいプロフィールが表示され、設定は完了。

画面上部に「登録機器一覧」と表示された画面に切り替わり、一覧に<Hearing Aid Phone>が表示され、機器名の右下に接続したいプロフィールが表示されていれば、設定は完了。

### ペ어링した機器の確認方法

Bluetoothメニューから[登録機器一覧]

### Bluetoothのオン/オフ方法

「ワイヤレスとネットワークの設定」一覧の[Bluetooth]、または「Bluetooth設定」一覧の[Bluetooth]の右側のチェックをタップ。チェックが青の場合、Bluetoothオンの状態。

### Bluetoothとの接続を画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。

### ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

通話中に画面左下の[三]ボタンをタップして表示されるメニューから、[Bluetooth ON (OFF)]をタップすることで、本体とBluetoothヘッドセットの音声を切り替え。

### 発信音の出力

携帯電話から聞こえる。

# au SH011 ペ어링方法

|       |       |
|-------|-------|
| 携帯会社名 | au    |
| 機種名   | SH011 |

|                       |
|-----------------------|
| Bluetoothメニューへのたどり着き方 |
| メインメニュー[Bluetooth]    |

## ペ어링方法

**STEP 1** <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

**STEP 2** Bluetoothメニューから、[2 新規登録]を選択。

Bluetoothメニューから、[2 新規登録]を選択。※画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が登録待機状態かご確認ください」と表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部の[OK]を選択。

**STEP 3** 一覧から、<Hearing Aid Phone>を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ち下さい」と表示された後、画面上部の表示が「機器検索 検索中…○件」→「機器選択 ○件」の順に切り替わるに替わるので、一覧から、<Hearing Aid Phone>を選択。

**STEP 4** 画面の右上方にBluetoothアイコンが表示され、設定完了。

画面中央に「<Hearing Aid Phone>に接続中です」と表示された後、「<Hearing Aid Phone> 認証処理中」→「<Hearing Aid Phone>に接続しました A2DP/HFPがご利用になれます」の順に切り替わり、画面の右上方にBluetoothアイコンが表示されたら、設定は完了。

### ペ어링した機器の確認方法

Bluetoothメニューから[1 登録機器一覧]

### Bluetoothのオン/オフ方法

方法1：Bluetoothメニューから[3 接続待ちON/OFF]→オンにする場合[1 接続待ちON]、オフにする場合[2 接続待ちOFF]  
方法2：待受画面表示中に数字[9]ボタンを長押し→[# 接続待ちON/OFF]

### Bluetoothとの接続を画面で確認する方法

画面最上部にBluetoothのアイコンが表示される。

### ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

[EZ]ボタン（電源ボタンの上）を押して、本体とBluetoothヘッドセットの音声を切り替え。

### 発信音の出力

携帯電話から聞こえる。