

au G11 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	G11

Bluetooth メニューへのたどり着き方
メニュー→[I/Comm/Wi-Fi/Bluetooth]→[3 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

STEP 2 Bluetoothメニューから、[2 新規登録]を選択。

Bluetoothメニューから、[2 新規登録]を選択。※画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が 登録待機状態か ご確認ください」と表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部の[OK]を選択。

STEP 3 一覧からペ어링したいBluetooth機器を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ちください」と表示された後、画面上部の表示が「機器探索 探索中… 〇件」→「機器選択 〇件」の順に切り替わるので、一覧からペ어링したいBluetooth機器を選択。

STEP 4 画面中央に「認証処理中」と書かれた画面に切り替わる。

画面中央に「<Hearing Aid Phone>に接続中です」と表示された後、画面最上部に「Bluetooth接続」、その下に<Hearing Aid Phone>、画面中央に「認証処理中」と書かれた画面に切り替わる。

STEP 5 画面の右上方にBluetoothアイコンが表示され、設定は完了。

「<Hearing Aid Phone> 認証処理中」という表示が出た後、「<Hearing Aid Phone>に接続しました A2DP/HFPがご利用になれます」という画面が表示され、画面の右上方にBluetoothアイコンが表示されたら、設定は完了。

ペ어링した機器の
確認方法

Bluetoothメニューから[1 登録機器一覧]

Bluetooth の
オン / オフ方法

Bluetoothメニューから[3 接続待ちON/OFF]→[1 接続待ちON]または[2 接続待ちOFF]

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面最上部にBluetoothのアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

[EZ]ボタン（電源ボタンの上）を押して、本体とBluetoothヘッドセットの音声を切り替え。

発信音の出力

携帯電話から聞こえる。

au S006 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	S006

Bluetooth メニューへのたどり着き方
メニュー→[ツール]→[4 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

STEP 2 Bluetoothメニューから、[2 新規登録]を選択。

Bluetoothメニューから、[2 新規登録]を選択。※画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が 登録待機状態か ご確認ください」と表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部の[OK]を選択。

STEP 3 一覧から、<Hearing Aid Phone>を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ちください」と表示された後、画面上部の表示が「機器探索 探索中… 〇件」→「機器選択 〇件」の順に切り替わるので、一覧から<Hearing Aid Phone>を選択。

STEP 4 「<Hearing Aid Phone>認証処理中」と書かれた画面に切り替わる。

画面中央に「<Hearing Aid Phone>に接続中です」と表示された後、画面中央に「<Hearing Aid Phone>認証処理中」と書かれた画面に切り替わる。

STEP 5 画面の右上方にBluetoothアイコンが表示され、設定は完了。

「<Hearing Aid Phone>認証処理中」という表示が出た後、「<Hearing Aid Phone>に接続しました A2DP/HFPがご利用になれます」という画面が表示され、画面の右上方にBluetoothアイコンが表示されたら、設定は完了。

ペ어링した機器の
確認方法

Bluetoothメニューから[1 登録機器一覧]

Bluetooth の
オン / オフ方法

方法1 : Bluetoothメニューから[3 接続待ちON/OFF]→[1 接続待ちON]または[2 接続待ちOFF]
方法2 : 待受画面表示中に[#]ボタンを長押し→[# 接続待ちON/OFF]

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面最上部にBluetoothのアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

[EZ]ボタン（電源ボタンの上）を押して、本体とBluetoothヘッドセットの音声を切り替え。

発信音の出力

携帯電話から聞こえる。