

au CA003 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	CASIO CA003

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[Bluetooth/ 赤外線]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 Bluetooth メニューから、[3 初期登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[3 初期登録] を選択。

STEP 3 [2 ハンズフリー機器を登録] を選択。

画面上部に「初期登録」と書かれた画面に変わるので、[2 ハンズフリー機器を登録] を選択。

STEP 4 [1 はい] を選択。

画面中央に「初期登録します よろしいですか?」と表示されるので、[1 はい] を選択。

STEP 5 一覧からペ어링する Bluetooth 機器を選択。

画面中央の表示が「探索中 ○件」→「○件 見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「機器選択 ○件」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링する Bluetooth 機器を選択。

STEP 6 パスキー入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

画面最上部に「Bluetooth 接続」、その下にペ어링する Bluetooth 機器名、画面中央に「認証処理中」と書かれた画面に切り替わる。画面下部の「パスキー入力」と書かれた入力欄に、30秒以内にパスキー「0000」を入力した後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示されない場合があります。

STEP 7 「HFP<ペ어링した Bluetooth 機器名>を登録しました」という画面に切り替わる。

画面中央に「<ペ어링する Bluetooth 機器名> 認証処理中」という表示が出た後、「HFP<ペ어링した Bluetooth 機器名>を登録しました」という画面が表示される。※接続する機器によっては、この表示がされない場合があります。

STEP 8 画面が切り替わる。

画面が切り替わり、メニューに戻る。

STEP 9 Bluetooth メニューから [1 ワイヤレス機器選択] を選択。

さらに A2DP で接続する (オーディオの音をヘッドセットに出力する) 場合は、再度 [Bluetooth] を選択し、Bluetooth メニューから [1 ワイヤレス機器選択] を選択。

STEP 10 画面が切り替わり、A2DP での接続が完了。

画面上部に「ワイヤレス機器選択」と書かれた画面に変わるので、一覧から、A2DP で接続したい Bluetooth 機器を選択。しばらくすると、「音出力先を<A2DP で接続したい Bluetooth 機器の名前>に設定しました」→「<A2DP で接続したい Bluetooth 機器名>に接続中です」→「A2DP <A2DP で接続した Bluetooth 機器名>に接続しました」の順に画面が切り替わり、A2DP での接続が完了。

au CA003 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	CASIO CA003

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[Bluetooth/ 赤外線]→[Bluetooth]

ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニューから [5 Bluetooth 設定]→[3 接続相手リスト]

Bluetooth の オン / オフ方法

Bluetooth メニューから [2 接続待ち開始 / 停止]→オンの場合 [1 接続待ち開始]、
オフの場合 [2 接続待ち停止]

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面最上部に Bluetooth のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

[EZ] ボタン（電源ボタンの上）を押して、本体とヘッドセットの音声を切替。

au CA004 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	CASIO CA004

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[アクセサリ]→[5 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 Bluetoothメニューから、[3 初期登録]を選択。

Bluetoothメニューから、[3 初期登録]を選択。

STEP 3 [2 ハンズフリー機器を登録]を選択。

画面上部に「初期登録」と書かれた画面に変わるので、[2 ハンズフリー機器を登録]を選択。

STEP 4 [1 はい]を選択。

画面中央に「初期登録します よろしいですか?」と表示されるので、[1 はい]を選択。

STEP 5 一覧からペ어링する Bluetooth 機器を選択。

画面中央の表示が「探索中 ○件」→「○件 見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「機器選択 ○件」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링する Bluetooth 機器を選択。

STEP 6 パスキー入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

画面最上部に「Bluetooth 接続」、その下にペ어링する Bluetooth 機器名、画面中央に「認証処理中」と書かれた画面に切り替わる。画面下部の「パスキー入力」と書かれた入力欄に、30秒以内にパスキー「0000」を入力した後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

STEP 7 「HFP<ペ어링した Bluetooth 機器名>を登録しました」という画面に切り替わる。

画面中央に「<ペ어링する Bluetooth 機器名> 認証処理中」という表示が出た後、「HFP <ペ어링した Bluetooth 機器名>を登録しました」という画面に切り替わる。

STEP 8 画面が切り替わる。

画面最上部に「アクセサリ」と表示された画面に戻る。

STEP 9 Bluetoothメニューから [1 ワイヤレス機器選択]を選択。

さらに A2DP で接続する (オーディオの音をヘッドセットに出力する) 場合は、再度 [5 Bluetooth] を選択し、Bluetoothメニューから [1 ワイヤレス機器選択] を選択。

STEP 10 画面が切り替わり、A2DP での接続が完了。

画面上部に「ワイヤレス機器選択」と書かれた画面に変わるので、一覧から、A2DP で接続したい Bluetooth 機器を選択。しばらくすると、「音出力先を <A2DP で接続したい Bluetooth 機器名> に設定しました」→「<A2DP で接続したい Bluetooth 機器名> に接続中です」→「A2DP <A2DP で接続した Bluetooth 機器名> に接続しました」の順に画面が切り替わり、接続が完了。

au CA004 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	CASIO CA004

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[アクセサリ]→[5 Bluetooth]

ペアリングした機器の確認方法

Bluetooth メニューから [5 Bluetooth 設定]→[4 接続相手リスト]

Bluetooth のオン / オフ方法

方法 1 : Bluetooth メニューから [2 接続待ち開始 / 停止]→オンの場合 [1 接続待ち開始]、オフの場合 [2 接続待ち停止]

方法 2 : 待受画面表示中に [#] ボタンを長押し

Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面最上部に Bluetooth のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

[EZ] ボタン（電源ボタンの上）を押して、本体とヘッドセットの音声を切替。

au CA005 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	CASIO CA005

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[Bluetooth/ 赤外線]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「Bluetoothメニュー」の一覧から、[2 新規登録]を選択。

「Bluetoothメニュー」の一覧から、[2 新規登録]を選択。

STEP 3 画面が表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押すことで、[OK]を選択。

画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が登録待機状態でご確認ください」と書かれた画面が表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押すことで、[OK]を選択。

STEP 4 ペ어링する Bluetooth 機器を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ちください」と表示された後、画面上部に「機器選択 ○件」と書かれた画面に変わるので、一覧から、ペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

STEP 5 パスキーを入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、[OK]を選択。

画面中央に「<ペ어링する Bluetooth 機器名>に接続中です」と表示された後、「認証処理中」と書かれた画面に切り替わる。画面下部の「パスキー入力」と書かれた入力欄に、30秒以内にパスキー「0000」を入力した後、十字キー真ん中のボタンを押すことで、[OK]を選択。※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示されない場合がある。

STEP 6 画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されたら、設定は完了。

「<ペ어링する Bluetooth 機器名>認証処理中」という表示が出た後、「<ペ어링した Bluetooth 機器名>に接続しました A2DP/HFP (※接続している機器の対応プロファイルにより表示が異なります。) がご利用になれます」という画面が表示され、画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されたら、設定は完了。

ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニューから [1 登録機器一覧]

Bluetooth の オン / オフ方法

Bluetooth メニューから [3 接続待ち ON/OFF]→オンの場合 [1 接続待ち ON]、オフの場合 [2 接続待ち OFF]

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面最上部に Bluetooth のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

[EZ] ボタン (電源ボタンの上) を押して、本体とヘッドセットの音声を切替。