

au IS02 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	TOSHIBA IS02

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[スタートキー] (液晶画面側にある Windows のアイコン)→スタートメニュー [設定]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを 7 秒間押す)

STEP 2 Bluetooth メニューから「新しいデバイスの追加 ...」をタップ。

Bluetooth メニュー (画面左上に「Bluetooth」と書かれた画面) の、画面真ん中の四角の枠に表示されている「新しいデバイスの追加 ...」をタップ。

STEP 3 ペ어링を行う Bluetooth 機器をタップした後、画面右下の [次へ] をタップ。

画面左上に「Bluetooth デバイスの選択」と書かれた画面に切り替わるので、画面真ん中の四角の枠に表示されている一覧から、ペ어링を行う Bluetooth 機器をタップした後、画面右下の [次へ] をタップ。

STEP 4 画面右下の [詳細設定] をタップ。

しばらくすると、画面の下の方に「デバイスが追加されました『Windows phone は [ペ어링した Bluetooth 機器名] と接続されています。』」と表示されている間に、画面右下の [詳細設定] をタップ。

STEP 5 チェックがついていることを確認し、画面右下の [保存] をタップ。

画面左上に「パートナーシップの設定」と書かれた画面に切り替わるので、一覧からペ어링したいプロファイルにチェック (□の中に V 印) がついていることを確認し、画面右下の [保存] をタップ (ステレオヘッドセット利用の場合「ワイヤレスステレオ」、ハンズフリー通話の場合「ハンズフリー」)。

STEP 6 ペ어링したい Bluetooth 機器が表示され、設定は完了。

画面左上に「Bluetooth」と書かれた画面に戻り、真ん中の四角の枠に表示されている「接続済み」の下に、ペ어링したい Bluetooth 機器が表示されていれば、設定は完了 (表示されない場合は、<や>をタップして、画面上部の黒い帯の中央に「デバイス」を表示させる)。

ペ어링した機器の確認方法

Bluetooth メニュー [デバイス] タブの、四角に囲まれた枠の中に表示される。

Bluetooth のオン / オフ方法

Bluetooth メニュー [モード] タブ→「Bluetooth をオンにする」の左側のチェックの有無で設定 (V 印のチェックがある場合がオン)

Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面上部にヘッドホンと♪マークが組み合わさったアイコンが表示される。
ハンズフリー接続の際は、通話中の画面右上にヘッドセットのアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

画面右下のサブメニューボタンから [ハンズフリーを (オン) オフ] を選択して切替

au LIGHT POOL ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	TOSHIBA LIGHT POOL

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[ツール (Tools)]→[4 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規登録] を選択。※画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が登録待機状態かご確認ください」と表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部の [OK] を選択。

STEP 3 一覧からペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ちください」と表示された後、画面上部に「機器選択 ○件」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

STEP 4 パスキー入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

画面中央に「<ペ어링する Bluetooth 機器名>に接続中です」と表示された後、画面最上部に「Bluetooth 接続」、その下にペ어링する Bluetooth 機器名、画面中央に「認証処理中」と書かれた画面に切り替わる。画面下部の「パスキー入力」と書かれた入力欄に、30秒以内にパスキー「0000」を入力した後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示されない場合があります。

STEP 5 画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示され、設定は完了。

「<ペ어링する Bluetooth 機器名>認証処理中」という表示が出た後、「<ペ어링した Bluetooth 機器名>に接続しました A2DP/HFP (※接続している機器の対応プロファイルにより表示が異なります。) がご利用になれます」という画面が表示され、画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されたら、設定は完了。

ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニューから [1 登録機器一覧]

Bluetooth の オン / オフ方法

方法1: Bluetooth メニューから [3 接続待ち ON/OFF]→オンの場合 [1 接続待ち ON]、
オフの場合 [2 接続待ち OFF]
方法2: 待受画面表示中に [#] ボタンを長押し→[# 接続待ち ON/OFF]

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面最上部に Bluetooth のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

[EZ] ボタン (電源ボタンの上) を押して、本体とヘッドセットの音声を切替。

au T003 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	TOSHIBA T003

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[Bluetooth/ 赤外線]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「Bluetooth メニュー」の一覧から、[2 新規登録]を選択。

「Bluetooth メニュー」の一覧から、[2 新規登録]を選択。

STEP 3 画面が表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押すことで、[OK]を選択。

画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が登録待機状態でご確認ください」と書かれた画面が表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押すことで、[OK]を選択。

STEP 4 一覧から、ペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ちください」と表示された後、画面上部に「機器選択 ○件」と書かれた画面に変わるので、一覧から、ペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

STEP 5 パスキーを入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、[OK]を選択。

画面中央に「<ペ어링する Bluetooth 機器名>に接続中です」と表示された後、「認証処理中」と書かれた画面に切り替わる。画面下部の「パスキー入力」と書かれた入力欄に、30秒以内にパスキー「0000」を入力した後、十字キー真ん中のボタンを押すことで、[OK]を選択。※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示されない場合がある。

STEP 6 画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されたら、設定は完了。

「<ペ어링する Bluetooth 機器名>認証処理中」という表示が出た後、「<ペ어링した Bluetooth 機器名>に接続しました A2DP/HFP (※接続している機器の対応プロファイルにより表示が異なります。) がご利用になれます」という画面が表示され、画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されたら、設定は完了。

ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニューから [1 登録機器一覧]

Bluetooth の オン / オフ方法

Bluetooth メニューから [3 接続待ち ON/OFF]→オンの場合 [1 接続待ち ON]、
オフの場合 [2 接続待ち OFF]

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面最上部に Bluetooth のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

[EZ] ボタン (電源ボタンの上) を押して、本体とヘッドセットの音声を切替。

au T004 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	TOSHIBA T004

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[Bluetooth/ 赤外線]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「2 新規登録」を選択。

「2 新規登録」を選択。

STEP 3 十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が登録待機状態をご確認ください」と書かれた画面に変わるので、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

STEP 4 一覧からペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ちください」と表示された後、画面上部に「機器選択」と書かれた画面に変わるので、一覧から、ペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

STEP 5 「0000」を入力し、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

画面中央に「<ペ어링する Bluetooth 機器名>に接続中です」と表示された後、「認証処理中」と書かれた画面に切り替わりますので、「パスキー入力」と書かれた下の入力欄に「0000」を入力し、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。
※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示されない場合があります。

STEP 6 画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されていれば、設定は完了

「<ペ어링する Bluetooth 機器名>認証処理中」という表示が出た後、「<ペ어링した Bluetooth 機器名>に接続しました A2DP/HFP (※接続している機器の対応プロファイルにより表示が異なります。) がご利用になれます」という画面が表示され、画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されたら、設定は完了です。

ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニューから [1 登録機器一覧]

Bluetooth の オン / オフ方法

Bluetooth メニューから [3 接続待ち ON/OFF]→オンの場合 [1 接続待ち ON]、
オフの場合 [2 接続待ち OFF]

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面最上部に Bluetooth のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

[EZ] ボタン (電源ボタンの上) を押して、本体とヘッドセットの音声を切替。

au T005 ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	TOSHIBA T005

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[Bluetooth/ 赤外線]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「2 新規登録」を選択。

「2 新規登録」を選択。

STEP 3 十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が登録待機状態をご確認ください」と書かれた画面に変わるので、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

STEP 4 ペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ちください」と表示された後、画面上部に「機器選択」と書かれた画面に変わるので、一覧から、ペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

STEP 5 「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、[OK] を選択。

画面中央に「<ペ어링する Bluetooth 機器名>に接続中です」と表示された後、「認証処理中」と書かれた画面に切り替わりますので、「パスキー入力」と書かれた下の入力欄に「0000」を入力し、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。
※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示されない場合があります。

STEP 6 画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示され、設定は完了。

「<ペ어링する Bluetooth 機器名>認証処理中」という表示が出た後、「<ペ어링した Bluetooth 機器名>に接続しました A2DP/HFP (※接続している機器の対応プロファイルにより表示が異なります。)

」がご利用になれます」という画面が表示され、画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されたら、設定は完了です。

ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニューから [1 登録機器一覧]

Bluetooth の オン / オフ方法

Bluetooth メニューから [3 接続待ち ON/OFF]→オンの場合 [1 接続待ち ON]、
オフの場合 [2 接続待ち OFF]

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面最上部に Bluetooth のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

[EZ] ボタン (電源ボタンの上) を押して、本体とヘッドセットの音声を切替。

au X-RAY ペ어링方法

携帯会社名	au
機種名	TOSHIBA X-RAY

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[Bluetooth/ 赤外線]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「2 新規登録」を選択。

「2 新規登録」を選択。

STEP 3 画面が変わったら、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

画面中央に「機器探索を行います 登録する機器が登録待機状態かご確認ください」と書かれた画面に変わるので、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。

STEP 4 ペ어링する Bluetooth 機器を選択。

画面中央に「機器探索中 しばらくお待ちください」と表示された後、画面上部に「機器選択」と書かれた画面に変わるので、一覧から、ペ어링したい Bluetooth 機器を選択。

STEP 5 「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、[OK] を選択。

画面中央に「<ペ어링する Bluetooth 機器名>に接続中です」と表示された後、「認証処理中」と書かれた画面に切り替わりますので、「パスキー入力」と書かれた下の入力欄に「0000」を入力し、十字キー真ん中のボタンを押して、画面最下部中央の [OK] を選択。
※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示されない場合があります。

STEP 6 画面中央の表示が「ハンズフリー機能 (オーディオ機能) 接続しました」に切り替わる。

「<ペ어링する Bluetooth 機器名>認証処理中」という表示が出た後、「<ペ어링した Bluetooth 機器名>に接続しました A2DP/HFP (※接続している機器の対応プロファイルにより表示が異なります。) がご利用になれます」という画面が表示され、画面の右上方に Bluetooth アイコンが表示されたら、設定は完了です。

ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニューから [1 登録機器一覧]

Bluetooth の オン / オフ方法

Bluetooth メニューから [3 接続待ち ON/OFF]→オンの場合 [1 接続待ち ON]、
オフの場合 [2 接続待ち OFF]

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面最上部に Bluetooth のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

[EZ] ボタン (電源ボタンの上) を押して、本体とヘッドセットの音声を切替。