

携帯会社名	docomo
機種名	L-03C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU]→ユーティリティ [Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

STEP 2 Bluetooth メニューから、[新規機器登録]を選択。

Bluetooth メニューから、[新規機器登録]を選択。

STEP 3 <Hearing Aid Phone>をタップすると「登録しますか?」と表示されるので、[はい]をタップ。

画面上部に「検索中」と書かれた画面に変わり、Bluetooth 機器の検索を始める。サーチが終わると、画面上部の表示が「新規機器登録」に変わり、一覧にペ어링できる Bluetooth 機器が表示されるので、<Hearing Aid Phone>をタップ。

画面中央に「登録しますか?」と表示されるので、[はい]をタップ。

STEP 4 パスキーの「0000」を入力後、画面下部の [OK] をタップ。

画面中央に「<Hearing Aid Phone>を登録中」と表示された後、画面上部に「Bluetooth パスキー入力」と書かれた画面に変わるので、<Hearing Aid Phone>の下に表示されている入力欄にパスキーの「0000」を入力後、画面下部の [OK] をタップ。

STEP 5 画面が、順に切り替わる。

画面中央の表示が、「お待ちください」→「完了しました」→「<Hearing Aid Phone>を登録中」→「完了しました」の順に切り替わる。

STEP 6 <Hearing Aid Phone>をタップすると、画面中央にメニュー一覧が表示されるので、[接続]をタップ。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧から <Hearing Aid Phone>をタップ。

画面中央にメニュー一覧が表示されるので、[接続]をタップ。

STEP 7 [ハンズフリー]をタップ。

画面中央に「接続種別」と書かれた画面が表示されるので、[ハンズフリー]をタップ。

STEP 8 画面が順に切り替わる。

しばらくすると、画面中央が「<Hearing Aid Phone>に接続しています」→「接続しました」の順に表示される。

STEP 9 <Hearing Aid Phone>をタップすると、画面中央にメニュー一覧が表示されるので、[接続]をタップ。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧から <Hearing Aid Phone>をタップ。画面中央にメニュー一覧が表示されるので、[接続]をタップ。

STEP 10 [オーディオ]をタップ。

画面中央に「接続種別」と書かれた画面が表示されるので、[オーディオ]をタップ。

STEP 11 画面が、順に切り替わる。

しばらくすると、画面中央が「<Hearing Aid Phone>に接続しています」→「接続しました」の順に切り替わる。

STEP 10 画面が戻り、接続完了。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に戻るので、接続完了。

携帯会社名	docomo
機種名	L-03C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU]→ユーティリティ [Bluetooth]

**ペアリングした機器の
確認方法**

Bluetoothメニュー→[登録機器リスト]

**Bluetooth の
オン / オフ方法**Bluetoothメニュー→一覧の一番上にある「Bluetooth」
(OFFの時は灰色の[○]ボタン、ONの時は青い[■]ボタンが表示される。)**Bluetooth との接続を
画面で確認する方法**

画面上方でBluetoothのアイコンが点滅。

**ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法**画面右下の[三]をタップしてサブメニューを呼び出した後、[Bluetooth] (または[携帯電話で通話]) を
タップして、音声出力を切り替え。**発信音の出力**

携帯電話から聞こえる。

携帯会社名	docomo
機種名	L-04C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[メニュー]→[本体設定]→[無線とネットワーク] (タップすると、「ワイヤレスとネットワークの設定」メニュー一覧が表示される)→[Bluetooth 設定]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

STEP 2 [デバイスのスキャン] をタップ。

Bluetooth をオンにした状態で、Bluetooth メニューから [デバイスのスキャン] をタップ。

STEP 3 <Hearing Aid Phone> をタップ。

画面下部の「Bluetooth 端末」の下に表示された、<Hearing Aid Phone> をタップ。

STEP 4 ポップアップが画面中央に表示された場合は、[ペア設定する] をタップ。

「Bluetooth のペア設定リクエスト "<Hearing Aid Phone>" とペ어링するか確認してください」というポップアップが画面中央に表示された場合は、[ペア設定する] をタップ。

STEP 5 ペ어링したい機器の名前の下の表示が切り替わり、設定完了。

ペ어링したい機器の名前の下の表示が、「ペアとして設定中 ...」→「ペア設定、非接続」→「接続中 ...」→「携帯電話とメディアの音声に接続」と順番に切り替わり、設定完了。

ペ어링した機器の
確認方法

「Bluetooth設定」画面下部、「Bluetooth端末」の下に表示される。

Bluetooth の
オン / オフ方法

「ワイヤレスとネットワークの設定」一覧の[Bluetooth]、またはBluetoothメニュー一覧の[Bluetooth]の右側のチェックをタップ。チェックが緑の場合、Bluetoothオンの状態。

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。携帯ユナイトで通話中は、画面左上の電話マークが青色に変わっている（本体で通話中は緑色）。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

通話中に本体画面左下に表示される、[Bluetooth]をタップして切り替え。
「Bluetooth」の下のバーが緑の場合に、Bluetoothから音声が出力される。

発信音の出力

補聴器から聞こえる。