

携帯会社名	docomo
機種名	N-02C

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 便利ツール]→十字キー右で2画面目に移動して [5 Bluetooth]

## ペ어링方法

## STEP 1 &lt;携帯ユナイト&gt; をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

## STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

## STEP 3 表示された文書を最後まで読み進め、[OK] を選択。

「Bluetooth と WLAN を同時に利用すると、WLAN がつながりにくくなることがあります。…」と書かれた文章が表示されるので、カーソルの右か下を押して最後まで読み進め、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

## STEP 4 十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

「登録する機器を登録待機状態にしてください」という表示が出てくるので、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

## STEP 5 一覧から &lt;Hearing Aid Phone&gt; を選択。

画面中央の表示が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧から <Hearing Aid Phone> を選択。

## STEP 6 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面が表示されるので、[YES] を選択。

## STEP 7 パスキーの「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して [確定] を選択。

しばらくすると、画面上部に「機器登録」と書かれた画面の表示が、「<Hearing Aid Phone> を登録中」→「Bluetooth パスキーは?」の順に切り替わるので、パスキーの「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して [確定] を選択。

## STEP 8 画面が順に切り替わる。

「<Hearing Aid Phone> を登録中」→「<Hearing Aid Phone> 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

## STEP 9 一覧から &lt;Hearing Aid Phone&gt; を選択。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧から <Hearing Aid Phone> を選択。

## STEP 10 [ハンズフリー] を選択。

画面上部に、<Hearing Aid Phone> が表示された画面に変わるので、[ハンズフリー] を選択。

## STEP 11 画面が順に切り替わるので、[YES] を選択し、続けて [オーディオ] を選択。

しばらくすると、画面中央が「<Hearing Aid Phone> に接続しています」→「<Hearing Aid Phone> と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わるので、[YES] を選択。画面上部に、<Hearing Aid Phone> が表示された画面に変わるので、[オーディオ] を選択。

## STEP 12 表示が切り替わり、[NO] を選択し設定終了。

しばらくすると、画面中央が「<Hearing Aid Phone> に接続しています」→「<Hearing Aid Phone> と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わるので、[NO] を選択し、設定を終了。

携帯会社名	docomo
機種名	N-02C

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 便利ツール]→十字キー右で2画面目に移動して [5 Bluetooth]

## ペアリングした機器の確認方法

Bluetoothメニュー→[1 登録機器リスト]

## Bluetooth のオン / オフ方法

Bluetoothメニュー→[3 Bluetoothオン (オフ) ]

## Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面上方の右側でBluetoothのアイコンが点灯。通話中はヘッドホンのアイコン、音楽再生中は♪マークと組み合わせたり、点滅する。

## ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

方法1：本体の[MENU]ボタンを押して、画面左下の[サブメニュー]を選択。→画面中央に表示される「サブメニュー」一覧の[1 通話機切替]を選択。

方法2：ヘッドセットへの切り替え…画面上部のBluetoothアイコンにヘッドホンが表示されるまで、通話ボタンを長押し。

本体への切り替え…画面上部のBluetoothアイコンからヘッドホンの表示が消えるまで、通話ボタンを長押し。

## 発信音の出力

携帯電話から聞こえる。

携帯会社名	docomo
機種名	N-03C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 便利ツール]→十字キー右で  
2画面目に移動して [2 Bluetooth]

## ペアリング方法

**STEP 1** <携帯ユナイト>をペアリングモードにする。

&lt;携帯ユナイト&gt;をペアリングモードにする。

**STEP 2** Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録]を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録]を選択。

**STEP 3** 十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

「登録する機器を登録待機状態にしてください」という表示が出てくるので、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

**STEP 4** 一覧から <Hearing Aid Phone> を選択。

画面中央の表示が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧から &lt;Hearing Aid Phone&gt; を選択。

**STEP 5** [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面が表示されるので、[YES] を選択。

**STEP 6** パスキーの「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。

しばらくすると、画面上部に「機器登録」と書かれた画面の表示が、「&lt;Hearing Aid Phone&gt; を登録中」→「Bluetooth パスキーは?」の順に切り替わるので、パスキーの「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。

**STEP 7** 画面が順に切り替わる。

「&lt;Hearing Aid Phone&gt; を登録中」→「&lt;Hearing Aid Phone&gt; 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

**STEP 8** 一覧から <Hearing Aid Phone> を選択。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧から &lt;Hearing Aid Phone&gt; を選択。

**STEP 9** [ハンズフリー] を選択。

画面上部に、&lt;Hearing Aid Phone&gt; が表示された画面に変わるので、[ハンズフリー] を選択。

**STEP 10** 画面が順に切り替わるので [YES] を選択し、続けて [オーディオ] を選択。

しばらくすると、画面中央が「&lt;Hearing Aid Phone&gt; に接続しています」→「&lt;Hearing Aid Phone&gt; と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わるので、[YES] を選択。画面上部に、&lt;Hearing Aid Phone&gt; が表示された画面に変わるので、[オーディオ] を選択。

**STEP 11** 表示が切り替わり、[NO] を選択し設定終了。

しばらくすると、画面中央が「&lt;Hearing Aid Phone&gt; に接続しています」→「&lt;Hearing Aid Phone&gt; と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わるので、[NO] を選択し、設定を終了。

携帯会社名	docomo
機種名	N-03C

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 便利ツール]→十字キー右で  
2 画面目に移動して [2 Bluetooth]ooth]

ペアリングした機器の  
確認方法

Bluetoothメニュー→[1 登録機器リスト]

Bluetooth の  
オン / オフ方法

Bluetoothメニュー→[3 Bluetoothオン (オフ) ]

Bluetooth との接続を  
画面で確認する方法

画面上方の右側でBluetoothのアイコンが点灯。通話中はヘッドホンのアイコン、  
音楽再生中は♪マークと組み合わせたり、点滅する。

ヘッドセットと本体との  
通話の切り替え方法

方法1：本体の[MENU]ボタンを押して、画面左下の[サブメニュー]を選択。  
→画面中央に表示される。「サブメニュー」一覧の[1 通話機切替]を選択。  
方法2：ヘッドセットへの切り替え…画面上部のBluetoothアイコンにヘッドホンが表示されるまで、  
通話ボタンを長押し。  
本体への切り替え…画面上部のBluetoothアイコンからヘッドホンの表示が消えるまで、  
通話ボタンを長押し。

## 発信音の出力

携帯電話から聞こえる。

携帯会社名	docomo
機種名	N-04C

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体のメニューキーを押す→[設定]→[無線とネットワーク] (タップすると、「ワイヤレスとネットワークの設定」のメニュー一覧が表示される)→[Bluetooth 設定]

## ペ어링方法

## STEP 1 &lt;携帯ユナイト&gt; をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

## STEP 2 [デバイスのスキャン] をタップ。

Bluetooth をオンにした状態で、Bluetooth メニューから [デバイスのスキャン] をタップ。

## STEP 3 &lt;Hearing Aid Phone&gt; をタップ。

画面下部の「Bluetooth 端末」の下に表示された、<Hearing Aid Phone> をタップ。

## STEP 4 ペ어링したい機器の名前の下の表示が順番に切り替わり、設定完了。

ペ어링したい機器の名前の下の表示が、「ペアとして設定中 ...」→「ペア設定、非接続」→「接続中 ...」→「携帯電話とメディアの音声に接続」と順番に切り替わり、設定完了。

ペ어링した機器の  
確認方法

「Bluetooth設定」画面中央、「Bluetooth端末」の下に表示される。

Bluetooth の  
オン / オフ方法

「ワイヤレス設定」一覧の[Bluetooth]、または「Bluetooth設定」一覧の[Bluetooth]の右側のチェックをタップ。チェックが青の場合、Bluetoothオンの状態。

Bluetooth との接続を  
画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。携帯ユナイトで通話中は、画面左上の電話マークが青色に変わっている（本体で通話中は緑色）。

ヘッドセットと本体との  
通話の切り替え方法

通話中に本体画面左下に表示される、[Bluetooth]をタップして切り替え。  
「Bluetooth」の下のバーが青の場合に、Bluetoothから音声が出力される。

## 発信音の出力

補聴器から聞こえる。