

携帯会社名	docomo
機種名	P-03C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 便利ツール]→十字キー右で
2 画面目に移動して [2 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

STEP 3 十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

「登録する機器を登録待機状態にしてください」という表示が出てくるので、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

STEP 4 一覧から <Hearing Aid Phone> を選択。

画面中央の表示が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧から、<Hearing Aid Phone> を選択。

STEP 5 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面が表示されるので、[YES] を選択。

STEP 6 パスキーの「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。

しばらくすると、画面上部に「機器登録」と書かれた画面の表示が、「<Hearing Aid Phone> を登録中」→「Bluetooth パスキーは?」の順に切り替わるので、パスキーの「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。

STEP 7 画面が順に切り替わる。

「<Hearing Aid Phone> を登録中」→「<Hearing Aid Phone> 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

STEP 8 [ハンズフリー] を選択。

画面上部に、<Hearing Aid Phone> が表示された画面に変わるので、[ハンズフリー] を選択。

STEP 9 画面が順に切り替わるので、[YES] を選択し、続けて [オーディオ] を選択。

しばらくすると、画面中央が「<Hearing Aid Phone> に接続しています」→「<Hearing Aid Phone> と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わるので、[YES] を選択。画面上部に、<Hearing Aid Phone> が表示された画面に変わるので、[オーディオ] を選択。

STEP 10 画面が順に切り替わり [NO] を選択し、設定を終了。

しばらくすると、画面中央が「<Hearing Aid Phone> に接続しています」→「<Hearing Aid Phone> と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わるので、[NO] を選択し、設定を終了。

携帯会社名	docomo
機種名	P-03C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 便利ツール]→十字キー右で
2 画面目に移動して [2 Bluetooth]

ペアリングした機器の
確認方法

Bluetoothメニュー→[1 登録機器リスト]

Bluetooth の
オン / オフ方法

Bluetoothメニュー→[3 Bluetoothオン (オフ)]

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面上方の右側でBluetoothのアイコンが点灯。
通話中はヘッドホン、音楽再生中は♪マークと組み合わせたり、点滅する。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

- ・ヘッドセットへの切り替え…
方法1：画面上部のBluetoothアイコンにヘッドホンが表示されるまで、通話ボタンを長押し。
方法2：[サブメニュー]→[1 通話機切替]
- ・本体への切り替え…
方法1：画面上部のBluetoothアイコンからヘッドホンの表示が消えるまで、通話ボタンを長押し。
方法2：[サブメニュー]→[1 通話機切替]

発信音の出力

携帯電話から聞こえる。