

携帯会社名	docomo
機種名	BlackBerry Curve 9300

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホームスクリーンからメニューキー（トラックパッドのすぐ左のボタン）→[接続管理]

## ペアリング方法

※「選択する」の動作は、本体中央のトラックパッドを押下することを指します。

## STEP 1 &lt;携帯ユナイト&gt;をペアリングモードにする。

<携帯ユナイト>をペアリングモードにする。

## STEP 2 [Bluetooth を設定] を選択。

「接続管理」の一覧から [Bluetooth を設定] を選択。 ※画面上部に「デバイス名を変更」と書かれたポップアップが表示されることがあるが、デバイス名を変更する必要が無ければ、[OK] を選択。

## STEP 3 ポップアップが表示されるので、[検索] を選択。

画面上部に「デバイス名を追加 デバイスを検索しますか？または、他のデバイスからの接続を待機しますか？」と書かれたポップアップが表示されるので、[検索] を選択。

## STEP 4 一覧から &lt;Hearing Aid Phone&gt; にカーソルを合わせ選択。

しばらくすると、「デバイスを検索しています ...」→「デバイスを選択」の順にポップアップが切り替わるので、一覧から <Hearing Aid Phone> にカーソルを合わせ選択。

## STEP 5 &lt;Hearing Aid Phone&gt; に接続しますか？と表示される場合は、[はい (Y)] を選択。

「<Hearing Aid Phone> を待機しています ...」→「ペアリングが完了しました。<Hearing Aid Phone> に接続しますか？」と表示される場合は、[はい (Y)] を選択。

## STEP 6 一覧に &lt;Hearing Aid Phone&gt; が表示されていれば、設定完了。

「<Hearing Aid Phone> を待機しています ...」→「<Hearing Aid Phone> への接続に成功しました」と表示された後、画面上部に「Bluetooth：有効」と表示された画面に切り替わり、一覧に <Hearing Aid Phone> が表示されていれば、設定完了。

ペアリングした機器の  
確認方法

Bluetoothオンの場合、[接続管理]→[Bluetoothのオプション]の一覧に表示される。

Bluetooth の  
オン / オフ方法

[接続管理]→[Bluetooth]

※オンの場合、「Bluetooth」の右側に緑字で、「オン」または「接続済み」と表示される。

Bluetooth との接続を  
画面で確認する方法

ホームスクリーンと音楽再生中は画面の右上に、通話中は画面の右下に「Bluetoothアイコン」と「< >」が表示される。

ヘッドセットと本体との  
通話の切り替え方法

通話中に[メニュー]キーを押すと、ポップアップメニューが表示され、一覧の中から以下のメニューを選択し、音声出力を切り替えることができる。

- ・「スピーカーフォンON」…本体のスピーカーから音声出力される。
- ・「スピーカーフォンOFF」…本体の受話口から音声出力される。
- ・「[ペアリングしたBluetooth機器名]を有効化する」…<Hearing Aid Phone>から音声出力される。

## 発信音の出力

補聴器から聞こえる。