

携帯会社名	docomo
機種名	SC-01C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体のメニューボタンを押す→[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth 設定]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

STEP 2 Bluetooth メニューから [デバイス検索] をタップ。

Bluetooth をオンにした状態で、Bluetooth メニューから [デバイス検索] をタップ。

STEP 3 <Hearing Aid Phone> をタップ。

画面下部の「Bluetooth デバイス」の下に表示された、<Hearing Aid Phone> をタップ。

STEP 4 画面中央に表示が出る場合は、[承認] をタップ。

画面中央に「Bluetooth ペ어링の要求 <Hearing Aid Phone> とペアにするためのパスワードを確認」という表示が出る場合は、[承認] をタップ。

STEP 5 <Hearing Aid Phone> の下の表示が順番に切り替わり、設定完了。

<Hearing Aid Phone> の下の表示が、「ペ어링中 ...」→「接続中 ...」→「接続」と順番に切り替わり、設定完了。

ペ어링した機器の
確認方法

「Bluetooth設定」画面中央、「Bluetoothデバイス」の下に表示される。

Bluetooth の
オン / オフ方法

Bluetoothメニューの[Bluetooth]の右側のチェックをタップ。
チェックが緑の場合、Bluetoothオンの状態。

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。携帯ユナイトで通話中は、
本体画面左上に、受話器とBluetoothが組み合わさった青いアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

本体画面右下のヘッドホンとBluetoothが組み合わさったアイコンをタップすることで、
本体とBluetoothヘッドセットの切り替えが可能。

発信音の出力

補聴器から聞こえる。