

携帯会社名	docomo
機種名	SH-01C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 便利ツール]→[0 Bluetooth]

## ペ어링方法

### STEP 1 <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

### STEP 2 Bluetooth メニューから、[5 新規機器登録]を選択。

Bluetooth メニューから、[5 新規機器登録]を選択。

### STEP 3 <Hearing Aid Phone>にカーソルを合わせ、[登録]を選択。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に変わり、真ん中の表示が「登録する機器を登録待機状態にしてください」→「サーチ中」→「機器情報収集中」の順に切り替わる。サーチが終わると、一覧にペ어링できる Bluetooth 機器が表示されるので、<Hearing Aid Phone>にカーソルを合わせ、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [登録] を選択。

### STEP 4 パスキーの「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [決定] を選択。

画面上部に「Bluetooth パスキー入力」と書かれた画面に変わるので、真ん中の入力欄にパスキーの「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [決定] を選択。

### STEP 5 画面が順に切り替わる。「通常接続機器（オーディオ）に設定しますか？」と表示される場合は [はい] を選択。

「<Hearing Aid Phone>を Bluetooth 認証中」→「<Hearing Aid Phone>を機器登録しました」の順に画面が切り替わる。その後「通常接続機器（オーディオ）に設定しますか？」という画面が表示される場合は、[はい] が選択されていることを確認し、十字キー真ん中のボタンを押す。

### STEP 6 Bluetooth メニューに戻り、[4 機器リスト・接続・切断]を選択。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に戻るので、[CLR] キー（数字の [2] の上のボタン）を押して、Bluetooth メニューに戻り、[4 機器リスト・接続・切断] を選択。

### STEP 7 ペ어링した Bluetooth 機器名にカーソルを合わせ、[接続]を選択。

画面上部に「機器リスト・接続・切断」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링した Bluetooth 機器名にカーソルを合わせ、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [接続] を選択。

### STEP 8 画面中央の表示が切り替わり、設定完了。

画面中央の表示が「<Hearing Aid Phone>に Bluetooth 接続中（ダイヤルアップ：接続待機）」→「<Hearing Aid Phone>に Bluetooth 接続しました」の順に切り替わり、設定完了。

携帯会社名	docomo
機種名	SH-01C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 便利ツール]→[0 Bluetooth]

**ペ어링した機器の  
確認方法**

Bluetoothメニュー→[機器リスト・接続・切断]

**Bluetooth の  
オン / オフ方法**

方法1 : Bluetoothメニュー→[6 Bluetooth電源オン (オフ) ]

方法2 : 待受画面で数字の[6]キーを長押し

**Bluetooth との接続を  
画面で確認する方法**

画面上方の左側でBluetoothのアイコンが点滅。

通話中はBluetoothとスピーカーが組み合わさったアイコンも表示される。

**ヘッドセットと本体との  
通話の切り替え方法**

方法1 : 十字キー真ん中のボタンを1秒以上押し続ける

方法2 : [サブメニュー] ([MENU]ボタンを押して呼出) →[8 Bluetooth (本体) 通話切替]を選択

**発信音の出力**

携帯電話から聞こえる。

携帯会社名	docomo
機種名	SH-03C

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体の [MENU] ボタンを押す→[設定]→[無線とネットワーク] (タップすると、「ワイヤレスとネットワークの設定」のメニュー一覧が表示される)→[Bluetooth 設定]

## ペ어링方法

## STEP 1 &lt;携帯ユナイト&gt; をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

## STEP 2 「Bluetooth 設定」の一覧から、[新規デバイス登録] をタップ。

「Bluetooth 設定」の一覧から、[新規デバイス登録] をタップ。

※「機器探索を行います。登録機器が待機状態かご確認ください。」というポップアップが表示される場合は、[OK] をタップ。

## STEP 3 &lt;Hearing Aid Phone&gt; をタップ。

「探索中・・・○件」→「検索結果」と切り替わり、Bluetooth 機器をサーチした検索結果の一覧が表示されるので、<Hearing Aid Phone> をタップ。

## STEP 4 画面が順に切り替わる。

「しばらくお待ちください」→「<Hearing Aid Phone> 接続中・・・」→「ハンズフリー機能、オーディオ機能に接続しました」の順に切り替わる。

## STEP 5 機器名の右下に接続したいプロフィールが表示され、設定完了。

画面上部に「登録機器一覧」と表示された画面に切り替わり、一覧に <Hearing Aid Phone> が表示され、機器名の右下に接続したいプロフィールが表示されていれば、設定は完了。

ペ어링した機器の  
確認方法

Bluetoothメニューから[登録機器一覧]

Bluetooth の  
オン / オフ方法

「ワイヤレスとネットワークの設定」一覧の[Bluetooth]、または「Bluetooth設定」一覧の[Bluetooth]の右側のチェックをタップ。チェックが青の場合、Bluetoothオンの状態。

Bluetooth との接続を  
画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。  
携帯ユナイトで通話中は、本体画面左上に、青い受話器のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との  
通話の切り替え方法

通話中に、本体の[MENU]ボタン押し、サブメニューを表示。  
→サブメニュー一覧から[Bluetooth ON(OFF)]をタップ。

## 発信音の出力

補聴器から聞こえる。

携帯会社名	docomo
機種名	SH-05C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[メニュー]→[便利ツール]→[Bluetooth]

## ペ어링方法

### STEP 1 <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

### STEP 2 Bluetooth メニューから、[新規機器登録]を選択。

Bluetooth メニューから、[新規機器登録]を選択。

### STEP 3 <Hearing Aid Phone>をタップ。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に変わり、真ん中の表示が「登録する機器を登録待機状態にしてください」→「サーチ中」→「機器情報収集中」の順に切り替わる。サーチが終わると、一覧にペ어링できる Bluetooth 機器が表示されるので、<Hearing Aid Phone>をタップ。

### STEP 4 パスキーの「0000」を入力後、画面右下の [Enter] を選択。

画面上部に「Bluetooth パスキー入力」と書かれた画面に変わるので、真ん中の入力欄にパスキーの「0000」を入力後、画面右下の [Enter] を選択。

### STEP 5 [はい]をタップ。

<Hearing Aid Phone>を Bluetooth 認証中→<Hearing Aid Phone>を機器登録しましたの順に画面が切り替わる。その後「通常接続機器（オーディオ）に設定しますか？」という画面が表示され、[はい]をタップ。

### STEP 6 [CLR] ボタンをタップして Bluetooth メニューに戻り、[機器リスト・接続・切断]をタップ。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に戻るので、[CLR] ボタンをタップして Bluetooth メニューに戻り、[機器リスト・接続・切断]をタップ。

### STEP 7 <Hearing Aid Phone>をタップ。

画面上部に「機器リスト・接続・切断」と書かれた画面に変わるので、一覧から <Hearing Aid Phone>をタップ。

### STEP 8 画面中央の表示が切り替わり、設定完了。

画面中央の表示が「<Hearing Aid Phone>に Bluetooth 接続中（ダイヤルアップ：接続待機）」→「<Hearing Aid Phone>に Bluetooth 接続しました」の順に切り替わり、設定完了。

携帯会社名	docomo
機種名	SH-05C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[メニュー]→[便利ツール]→[Bluetooth]

**ペアリングした機器の  
確認方法**

Bluetoothメニュー→[機器リスト・接続・切断]

**Bluetooth の  
オン / オフ方法**

Bluetoothメニュー→[Bluetooth電源オン（オフ）]

**Bluetooth との接続を  
画面で確認する方法**

画面上方の左側でBluetoothのアイコンが点滅。  
通話中はBluetoothとスピーカーが組み合わさったアイコンも表示される。

**ヘッドセットと本体との  
通話の切り替え方法**

方法1：サイドボタンを1秒以上押し続ける  
方法2：[サブメニュー]→[Bluetooth（本体）通話切替]の順にタップ

**発信音の出力**

携帯電話から聞こえる。

携帯会社名	docomo
機種名	SH-06C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[メニュー]→[便利ツール]→[Bluetooth]

## ペアリング方法

### STEP 1 <携帯ユナイト>をペアリングモードにする。

<携帯ユナイト>をペアリングモードにする。

### STEP 2 Bluetooth メニューから、[新規機器登録]を選択。

Bluetooth メニューから、[新規機器登録]を選択。

### STEP 3 <Hearing Aid Phone>をタップ。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に変わり、真ん中の表示が「登録する機器を登録待機状態にしてください」→「サーチ中」→「機器情報収集中」の順に切り替わる。サーチが終わると、一覧にペアリングできる Bluetooth 機器が表示されるので、<Hearing Aid Phone>をタップ。

### STEP 4 パスキーの「0000」を入力後、画面右下の [Enter] を選択。

画面上部に「Bluetooth パスキー入力」と書かれた画面に変わるので、真ん中の入力欄にパスキーの「0000」を入力後、画面右下の [Enter] を選択。

### STEP 5 [はい]をタップ。

<Hearing Aid Phone>を Bluetooth 認証中→<Hearing Aid Phone>を機器登録しましたの順に画面が切り替わる。その後「通常接続機器 (オーディオ) に設定しますか?」という画面が表示され、[はい]をタップ。

### STEP 6 [CLR] ボタンをタップして Bluetooth メニューに戻り、[機器リスト・接続・切断]をタップ。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に戻るので、[CLR] ボタンをタップして Bluetooth メニューに戻り、[機器リスト・接続・切断]をタップ。

### STEP 7 一覧から <Hearing Aid Phone>をタップ。

画面上部に「機器リスト・接続・切断」と書かれた画面に変わるので、一覧から <Hearing Aid Phone>をタップ。

### STEP 8 表示が順に切り替わり、設定完了。

画面中央の表示が「<Hearing Aid Phone>に Bluetooth 接続中 (ダイヤルアップ : 接続待機)」→「<Hearing Aid Phone>に Bluetooth 接続しました」の順に切り替わり、設定完了。

携帯会社名	docomo
機種名	SH-06C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[メニュー]→[便利ツール]→[Bluetooth]

**ペアリングした機器の  
確認方法**

Bluetoothメニュー→[機器リスト・接続・切断]

**Bluetooth の  
オン / オフ方法**

Bluetoothメニュー→[Bluetooth電源オン（オフ）]

**Bluetooth との接続を  
画面で確認する方法**

画面上方の左側でBluetoothのアイコンが点滅。  
通話中はBluetoothとスピーカーが組み合わさったアイコンも表示される。

**ヘッドセットと本体との  
通話の切り替え方法**

方法1：サイドボタンを1秒以上押し続ける  
方法2：[サブメニュー]→[Bluetooth（本体）通話切替]の順にタップ

**発信音の出力**

携帯電話から聞こえる。