

携帯会社名	docomo
機種名	SO-01C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体のメニューキーを押す(画面下の一番右のボタン)
→[設定]→[無線とネットワーク](タップすると、「ワイヤレスとネットワークの設定」のメニュー一覧が表示される)→[Bluetooth設定]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

STEP 2 「端末のスキャン」 をタップ。

Bluetooth をオンにした状態で、[Bluetooth 設定] 画面中央の「端末のスキャン」 をタップ。

STEP 3 <Hearing Aid Phone> をタッチ。

画面中央の [Bluetooth 端末] の下に、ペ어링したい Bluetooth 機器名が表示されるので、<Hearing Aid Phone> をタップ。

STEP 4 ポップアップが画面中央に表示された場合は、[ペア設定する] をタップ。

<Hearing Aid Phone> の下の表示が、「ペアとして設定中 ...」と表示された後、「Bluetooth のペア設定リクエスト "<Hearing Aid Phone>" がペア設定をリクエストしています。」というポップアップが画面中央に表示された場合は、[ペア設定する] をタップ。

STEP 5 <Hearing Aid Phone> の下の表示が順番に切り替わり、設定完了。

<Hearing Aid Phone> の下の表示が、「接続中 ...」→「ペア設定、非接続」→「携帯電話とメディアの音声に接続」と順番に切り替わり、設定完了。

ペ어링した機器の
確認方法

「Bluetooth設定」画面下部の「Bluetooth端末」の下に表示される。

Bluetooth の
オン / オフ方法

「ワイヤレスとネットワークの設定」一覧の[Bluetooth]、または「Bluetooth設定」一覧の[Bluetooth]の右側のチェックをタップ。チェックが白の場合、Bluetoothオンの状態。

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。
通話中は、画面の左上にBluetoothマークと受話器が組み合わさったアイコンも表示される。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

通話中に本体画面下部中央に表示される、[Bluetooth]をタップして切り替え。
「Bluetooth」の下のバーが緑の場合に、Bluetoothから音声が出力される。

発信音の出力

補聴器から聞こえる。