

携帯会社名	docomo
機種名	T-01C

Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体の [MENU] ボタン→[設定]→
[ワイヤレス設定]→[Bluetooth 設定]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

STEP 2 「端末のスキャン」 をタップ。

Bluetooth をオンにした状態で、Bluetooth メニューから [端末のスキャン] をタップ。

STEP 3 <Hearing Aid Phone> をタップ。

画面下部の「Bluetooth 端末」の下に表示された、<Hearing Aid Phone> をタップ。

STEP 4 表示が順番に切り替わり、設定完了。

<Hearing Aid Phone> の下の表示が、「ペアとして設定中 ...」→「ペア設定済み」→「接続中 ...」→「携帯電話とメディアの音声に接続」と順番に切り替わり、設定完了。

ペ어링した機器の
確認方法

「Bluetooth設定」画面中央、「Bluetooth端末」の下に表示される。

Bluetooth の
オン / オフ方法

「ワイヤレス設定」一覧の[Bluetooth]、または「Bluetooth設定」一覧の[Bluetooth]の右側の
チェックをタップ。チェックが青の場合、Bluetoothオンの状態。

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。携帯ユナイトで通話中は、
画面左上の電話マークが青色に変わっている（本体で通話中は緑色）。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

通話中に本体画面左下に表示される、[Bluetooth]をタップして切り替え。
「Bluetooth」の下のバーが青の場合に、Bluetoothから音声が出力される。

発信音の出力

補聴器から聞こえる。