

携帯会社名	docomo
機種名	FUJITSU F-06B

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU]→[6 便利ツール]→[8 Wi-Fi/Bluetooth]→[2 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 Bluetooth メニューから、[5 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[5 新規機器登録] を選択。

STEP 3 十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [登録] を選択。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に変わり、真ん中の表示が「登録する機器を登録待機状態にしてください」→「サーチ中」→「機器情報収集中」の順に切り替わる。サーチが終わると、一覧にペ어링できる Bluetooth 機器が表示されるので、ペ어링を行う Bluetooth 機器にカーソルを合わせ、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [登録] を選択。

STEP 4 パスキーを入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [決定] を選択。

画面上部に「Bluetooth パスキー入力」と書かれた画面に変わるので、その下の入力欄にパスキー「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [決定] を選択。

STEP 5 十字キー真ん中のボタンを押す。

「[ペ어링を行う Bluetooth 機器名] を Bluetooth 認証中」→「[ペ어링を行う Bluetooth 機器名] を機器登録しました」の順に画面が切り替わり、その後「通常接続機器 (オーディオ) に設定しますか?」という画面が表示されるので、[はい] が選択されていることを確認し、十字キー真ん中のボタンを押す。

STEP 6 Bluetooth メニューに戻り、[4 機器リスト・接続・切断] を選択。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に戻るので、[CLR] キー (数字の [2] の上のボタン) を押して、Bluetooth メニューに戻り、[4 機器リスト・接続・切断] を選択。

STEP 7 十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [接続] を選択。

画面上部に「機器リスト・接続・切断」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링した Bluetooth 機器名にカーソルを合わせ、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [接続] を選択。

STEP 8 待受画面に戻り、設定完了。

画面中央の表示が「[ペ어링した Bluetooth 機器名] に Bluetooth 接続中 (ダイヤルアップ: 接続待機)」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] に Bluetooth 接続しました」の順に表示された後で待受画面に戻り、設定完了。

ペ어링した機器の
確認方法

Bluetooth メニュー→[4 機器リスト・接続・切断] を選択

Bluetooth の
オン / オフ方法

Bluetooth メニュー→[6 Bluetooth 電源オン (オフ)] を選択

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面上部の左側で青色の Bluetooth のアイコンが点滅。
通話中は Bluetooth とスピーカーが組み合わさったアイコンも表示される。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

方法1: 通話ボタンを1秒以上押し続ける
方法2: [サブメニュー] (本体の [MENU] ボタンを押す)→[9 Bluetooth (本体) 通話切替] を選択

携帯会社名	docomo
機種名	FUJITSU F-07B

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 LifeKit]→[* Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを 7 秒間押す)

STEP 2 Bluetooth メニューから、[3 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[3 新規機器登録] を選択。

STEP 3 十字キー真ん中のボタンで [OK] を選択。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わり、真ん中に「サーチします。登録する機器を登録待機状態にしてください」と表示されるので、十字キー真ん中のボタンで [OK] を選択。

STEP 4 ペ어링する Bluetooth 機器を選択。

画面上部に「サーチ」と書かれた画面に変わり、その下に「サーチ中」→「○件見つかりました」の順に表示される。サーチが終わると、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わり、一覧にペ어링できる Bluetooth 機器が表示されるので、ペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

STEP 5 パスキーを入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。

画面上部に「機器登録」、その下に「[ペ어링を行う Bluetooth 機器名] 登録中」と書かれた画面が表示された後、画面上部に「Bluetooth パスキー」と書かれた画面に変わる。「Bluetooth パスキー」「0000」を入力してください」と書かれた下の入力欄にパスキーを入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。

STEP 6 画面中央に「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 登録しました」と表示される。

再び、画面上部に「機器登録」、その下に「[ペ어링を行う Bluetooth 機器名] 登録中」と表示される画面に切り替わり、その後、画面中央に「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 登録しました」と表示される。

STEP 7 ペ어링したいプロファイルの左側にチェックを入れ、[接続] を押す。

画面上部に「[ペ어링した Bluetooth 機器名]」が書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링したいプロファイルの左側にチェックを入れ、[接続] (本体のカメラのアイコンのボタン) を押す。(ハンズフリー通話の場合「ハンズフリー (HFP)」、ステレオヘッドセット利用の場合「オーディオ (A2DP)」、ダイヤルアップ接続利用の場合「ダイヤルアップ (DUN)」にそれぞれチェックを入れる。)

STEP 8 待受画面に戻り、設定完了。

画面上部に「接続」と書かれた画面に変わり、「[ペ어링した Bluetooth 機器名] [接続するプロファイル名] 接続中」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] [接続したプロファイル名] 接続しました」の順に表示された後で待受画面に戻り、設定完了。

ペ어링した機器の確認方法

Bluetooth メニュー→[2 登録機器リスト]

Bluetooth のオン/オフ方法

Bluetooth メニュー→[1 Bluetooth オン/オフ]

Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面上部の左側で青色の Bluetooth のアイコンが点滅。
通話中は Bluetooth とスピーカーが組み合わさったアイコンも表示される。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

方法 1 : 通話ボタンを 1 秒以上押し続ける
方法 2 : [MENU]→[0 Bluetooth (本体) 通話切替] を選択