

携帯会社名	docomo
機種名	Panasonic P-01B

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[LifeKit]→[5 Bluetooth]

## ペ어링方法

### STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

### STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

### STEP 3 [OK] を選択。

画面中央に「登録する機器を登録待機状態にしてください」という画面が表示されるので、[OK] を選択。

### STEP 4 ペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

画面中央の表示が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

### STEP 5 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面が表示されるので、[YES] を選択。

### STEP 6 パスキーを入力後、[確定] を選択。

画面上部に「機器登録」と書かれた画面の中央の表示が、「[ペ어링を行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「Bluetooth パスキーを入力してください」の順に切り替わるので、パスキー「0000」を入力後、[確定] を選択。

### STEP 7 画面が切り替わる。

「[ペ어링を行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

### STEP 8 接続したいプロファイルを選択。

画面上部に、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示された画面に変わるので、接続したいプロファイルを選択。(ハンズフリー通話の場合…[2 ハンズフリー]、ステレオヘッドセット利用の場合…[3 オーディオ]、ダイヤルアップ接続利用の場合…[4 ダイヤルアップ])

### STEP 9 必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

しばらくすると、画面中央が「[ペ어링した Bluetooth 機器名] と接続中」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わりるので、複数のプロファイルを利用する場合は [YES] を選択し、この操作を繰り返す。必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

#### ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニュー→[1 登録機器リスト]

#### Bluetooth の オン/オフ方法

Bluetooth メニュー→[3 Bluetooth 起動 (電源オフ)]

#### Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面上部中央に、青色の Bluetooth アイコンが点滅する。  
ステレオヘッドセットで利用している場合は、♪マークと交互に表示される。

#### ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

通話ボタン (数字の1の上のボタン) を数秒押し続けて切替。  
Bluetooth 機器に切り替えたときは、画面中央左側に、Bluetooth アイコンが表示される。

携帯会社名	docomo
機種名	Panasonic P-02B

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[LifeKit]→[6 Bluetooth]

## ペアリング方法

## STEP 1 携帯ユナイトをペアリングモードにする。

携帯ユナイトをペアリングモードにする。(マルチボタンを 7 秒間押す)

## STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

## STEP 3 [OK] を選択。

画面中央に「登録する機器を登録待機状態にしてください」という画面が表示されるので、[OK] を選択。

## STEP 4 ペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

画面中央の表示が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧からペアリングを行う Bluetooth 機器を選択。

## STEP 5 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面が表示されるので、[YES] を選択。

## STEP 6 パスキーを入力後、[確定] を選択。

画面上部に「機器登録」と書かれた画面の中央の表示が、「[ペアリングを行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「Bluetooth パスキーを入力してください」の順に切り替わるので、パスキー「0000」を入力後、[確定] を選択。

## STEP 7 画面が切り替わる。

「[ペアリングを行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「[ペアリングした Bluetooth 機器名] 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

## STEP 8 接続したいプロファイルを選択。

画面上部に、ペアリングした Bluetooth 機器名が表示された画面に変わるので、接続したいプロファイルを選択。(ハンズフリー通話の場合…[2 ハンズフリー]、ステレオヘッドセット利用の場合…[3 オーディオ]、ダイヤルアップ接続利用の場合…[4 ダイヤルアップ])

## STEP 9 必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

しばらくすると、画面中央が「[ペアリングした Bluetooth 機器名] と接続中」→「[ペアリングした Bluetooth 機器名] と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わりるので、複数のプロファイルを利用する場合は [YES] を選択し、この操作を繰り返す。必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

ペアリングした機器の  
確認方法

Bluetooth メニュー→[1 登録機器リスト]

Bluetooth の  
オン/オフ方法

Bluetooth メニュー→[3 Bluetooth 起動 (電源オフ)]

Bluetooth との接続を  
画面で確認する方法

画面上部中央に、青色の Bluetooth アイコンが点滅する。  
ステレオヘッドセットで利用している場合は、♪マークと交互に表示される。

ヘッドセットと本体との  
通話の切り替え方法

通話ボタン (数字の 1 の上のボタン) を数秒押し続けて切替。  
Bluetooth 機器に切り替えたときは、画面中央左側に、Bluetooth アイコンが表示される。

携帯会社名	docomo
機種名	Panasonic P-04B

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[LifeKit]→[5 Bluetooth]

## ペアリング方法

## STEP 1 携帯ユナイトをペアリングモードにする。

携帯ユナイトをペアリングモードにする。(マルチボタンを 7 秒間押す)

## STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

## STEP 3 [OK] を選択。

画面中央に「登録する機器を登録待機状態にしてください」という画面が表示されるので、[OK] を選択。

## STEP 4 ペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

画面中央の表示が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧からペアリングを行う Bluetooth 機器を選択。

## STEP 5 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面が表示されるので、[YES] を選択。

## STEP 6 パスキーを入力後、[確定] を選択。

画面上部に「機器登録」と書かれた画面の中央の表示が、「[ペアリングを行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「Bluetooth パスキーを入力してください」の順に切り替わるので、パスキー「0000」を入力後、[確定] を選択。

## STEP 7 画面が切り替わる。

「[ペアリングを行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「[ペアリングした Bluetooth 機器名] 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

## STEP 8 接続したいプロファイルを選択。

画面上部に、ペアリングした Bluetooth 機器名が表示された画面に変わるので、接続したいプロファイルを選択。(ハンズフリー通話の場合…[2 ハンズフリー]、ステレオヘッドセット利用の場合…[3 オーディオ]、ダイヤルアップ接続利用の場合…[4 ダイアルアップ])

## STEP 9 必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

しばらくすると、画面中央が「[ペアリングした Bluetooth 機器名] と接続中」→「[ペアリングした Bluetooth 機器名] と接続しました別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わりるので、複数のプロファイルを利用する場合は [YES] を選択し、この操作を繰り返す。必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

ペアリングした機器の  
確認方法

Bluetooth メニュー→[1 登録機器リスト]

Bluetooth の  
オン/オフ方法

Bluetooth メニュー→[3 Bluetooth 起動 (電源オフ)]

Bluetooth との接続を  
画面で確認する方法

画面上部中央に、青色の Bluetooth アイコンが点滅する。  
ステレオヘッドセットで利用している場合は、♪マークと交互に表示される。

ヘッドセットと本体との  
通話の切り替え方法

通話ボタン (数字の 1 の上のボタン) を数秒押し続けて切替。  
Bluetooth 機器に切り替えたときは、画面中央左側に、Bluetooth アイコンが表示される。

携帯会社名	docomo
機種名	Panasonic P-06B

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 便利ツール]→十字キー右で2画面目に移動して [3 Bluetooth]

## ペアリング方法

## STEP 1 携帯ユナイトをペアリングモードにする。

携帯ユナイトをペアリングモードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

## STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

## STEP 3 十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

「登録する機器を登録待機状態にしてください」という表示が出てくるので、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

## STEP 4 ペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

画面中央の表示が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧から、ペアリングを行う Bluetooth 機器を選択。

## STEP 5 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面が表示されるので、[YES] を選択。

## STEP 6 パスキーを入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。

しばらくすると、画面上部に「機器登録」と書かれた画面の表示が、「[ペアリングを行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「Bluetooth パスキーは?」の順に切り替わるので、パスキー「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。

## STEP 7 画面が切り替わる。

「[ペアリングを行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「[ペアリングした Bluetooth 機器名] 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

## STEP 8 接続したいプロファイルを選択。

画面上部に [ペアリングした Bluetooth 機器名] が表示された画面に変わるので、接続したいプロファイルを選択。(ハンズフリー通話の場合…[2 ハンズフリー]、ステレオヘッドセット利用の場合…[3 オーディオ]、ダイヤルアップ接続利用の場合…[4 ダイヤルアップ])

## STEP 9 必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

しばらくすると、画面中央が「[ペアリングした Bluetooth 機器名] と接続中」→「[ペアリングした Bluetooth 機器名] と接続しました別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わりるので、複数のプロファイルを利用する場合は [YES] を選択し、この操作を繰り返す。必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

## ペアリングした機器の確認方法

Bluetooth メニュー→[1 登録機器リスト]

## Bluetooth のオン/オフ方法

Bluetooth メニュー→[3 Bluetooth 起動 (電源オフ)]

## Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面上部の右側で Bluetooth のアイコンが点灯。  
通話中はヘッドホン、音楽再生中は♪マークと組み合わせたり、点滅する。

## ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

- ・ヘッドセットへの切替…画面上部の Bluetooth アイコンにヘッドホンが表示されるまで、通話ボタンを長押し。
- ・本体への切替…画面上部の Bluetooth アイコンからヘッドホンの表示が消えるまで、通話ボタンを長押し。

携帯会社名	docomo
機種名	Panasonic P-07A

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[LifeKit]→[5 Bluetooth]

## ペアリング方法

## STEP 1 携帯ユナイトをペアリングモードにする。

携帯ユナイトをペアリングモードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

## STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

## STEP 3 ペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

画面中央の表示が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧からペアリングを行う Bluetooth 機器を選択。

## STEP 4 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面が表示されるので、[YES] を選択。

## STEP 5 パスキーを入力後、[確定] を選択。

画面上部に「機器登録」と書かれた画面の中央の表示が、「[ペアリングを行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「Bluetooth パスキーを入力してください」の順に切り替わるので、パスキー「0000」を入力後、[確定] を選択。

## STEP 6 画面が切り替わる。

「[ペアリングを行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「[ペアリングした Bluetooth 機器名] 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

## STEP 7 接続したいプロファイルを選択。

画面上部に、ペアリングした Bluetooth 機器名が表示された画面に変わるので、接続したいプロファイルを選択。(ハンズフリー通話の場合…[2 ハンズフリー]、ステレオヘッドセット利用の場合…[3 オーディオ]、ダイヤルアップ接続利用の場合…[4 ダイヤルアップ])

## STEP 8 必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

しばらくすると、画面中央が「[ペアリングした Bluetooth 機器名] と接続中」→「[ペアリングした Bluetooth 機器名] と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わりるので、複数のプロファイルを利用する場合は [YES] を選択し、この操作を繰り返す。必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

ペアリングした機器の確認方法	Bluetooth メニュー→[1 登録機器リスト]
Bluetooth のオン/オフ方法	Bluetooth メニュー→[3 Bluetooth 起動 (電源オフ)]
Bluetooth との接続を画面で確認する方法	画面上部中央に、青色の Bluetooth アイコンが点滅する。
ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法	通話ボタン (数字の1の上のボタン) を数秒押し続けて切替。 Bluetooth 機器に切り替えたときは、画面中央左側に、Bluetooth アイコンが表示される。

携帯会社名	docomo
機種名	Panasonic P-09A

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[LifeKit]→[5 Bluetooth]

## ペ어링方法

### STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを 7 秒間押す)

### STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

### STEP 3 ペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

画面中央の表示が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

### STEP 4 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面が表示されるので、[YES] を選択。

### STEP 5 パスキーを入力後、[確定] を選択。

画面上部に「機器登録」と書かれた画面の中央の表示が、「[ペ어링を行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「Bluetooth パスキーを入力してください」の順に切り替わるので、パスキー「0000」を入力後、[確定] を選択。

### STEP 6 画面が切り替わる。

「[ペ어링を行う Bluetooth 機器名] を登録中」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

### STEP 7 接続したいプロファイルを選択。

画面上部に、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示された画面に変わるので、接続したいプロファイルを選択。(ハンズフリー通話の場合…[2 ハンズフリー]、ステレオヘッドセット利用の場合…[3 オーディオ]、ダイヤルアップ接続利用の場合…[4 ダイヤルアップ])

### STEP 8 必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

しばらくすると、画面中央が「[ペ어링した Bluetooth 機器名] と接続中」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わりるので、複数のプロファイルを利用する場合は [YES] を選択し、この操作を繰り返す。必要なプロファイルの接続を終えた場合は、[NO] を選択し、設定を終了。

#### ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニュー→[1 登録機器リスト]

#### Bluetooth の オン/オフ方法

Bluetooth メニュー→[3 Bluetooth 起動 (電源オフ)]

#### Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面上部中央に、青色の Bluetooth アイコンが点滅する。

#### ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

通話ボタン (数字の 1 の上のボタン) を数秒押し続けて切替。  
Bluetooth 機器に切り替えたときは、画面中央左側に、Bluetooth アイコンが表示される。