

携帯会社名	docomo
機種名	Research In Motion BlackBerry Bold 9700

Bluetooth メニューへのたどり着き方
ホームスクリーンからメニューキー
(トラックパッドのすぐ左のボタン)→[接続管理]

ペ어링方法

※「選択する」の動作は、本体中央のトラックパッドを押下することを指します。

STEP 1 「接続管理」の一覧から [Bluetooth を設定] を選択。

「接続管理」の一覧から [Bluetooth を設定] を選択。

STEP 2 デバイス名を変更する必要が無ければ、[OK] を選択。

画面上部に「デバイス名を変更」と書かれたポップアップが表示されることがあるが、デバイス名を変更する必要が無ければ、[OK] を選択。

STEP 3 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 4 ポップアップが表示されるので、[検索] を選択。

画面上部に「デバイス名を追加」と書かれたポップアップが表示されるので、[検索] を選択。

STEP 5 ペ어링したい Bluetooth 機器にカーソルを合わせ選択。

しばらくすると、画面上部に「デバイスを選択」と書かれたポップアップが表示されるので、一覧から、ペ어링したい Bluetooth 機器にカーソルを合わせ選択。

STEP 6 「[ペ어링したい Bluetooth 機器名] を待機しています…」と表示される。

「[ペ어링したい Bluetooth 機器名] を待機しています…」と表示される。

STEP 7 8. の表示になるまで待つ。

「[ペ어링したい Bluetooth 機器名] の数値パスキーを入力:」と表示される場合は、パスキー「0000」を入力して選択。再び「[Bluetooth 機器] を待機しています…」と表示されるので、8. の表示になるまで待つ。※接続する機器によっては、パスキーの入力が省略されることがあります。

STEP 8 [はい (Y)] を選択。

「ペ어링が完了しました。[ペ어링した Bluetooth 機器名] に接続しますか?」と表示されるので、[はい (Y)] を選択。

STEP 9 10. の表示になるまで待つ。

「[ペ어링した Bluetooth 機器名] を待機しています…」と表示されるので、10. の表示になるまで待つ。

STEP 10 緑色のチェックがついていれば、設定は完了

画面上部に「[ペ어링した Bluetooth 機器名] への接続に成功しました。」と表示された画面に切り替わり、接続したいプロファイルの横に緑色のチェックがついていれば、設定は完了 (通話をする場合→ハンズフリー、音楽を聴く場合→ステレオオーディオ、メディアプレーヤーを操作する場合→A/V リモコン)。

携帯会社名	docomo	Bluetooth メニューへのたどり着き方 ホームスクリーンからメニューキー (トラックパッドのすぐ左のボタン)→[接続管理]
機種名	Research In Motion BlackBerry Bold 9700	

**ペアリングした機器の
確認方法**

Bluetooth オンの場合、[接続管理]→[Bluetooth のオプション]の一覧に表示される。

**Bluetooth の
オン/オフ方法**

[接続管理]→[Bluetooth]
※オンの場合、「Bluetooth」の右側に緑字で、「オン」または「接続済み」と表示される。

**Bluetooth との接続を
画面で確認する方法**

ホームスクリーンと音楽再生中は画面の右上に、通話中は画面の右下に「Bluetooth アイコン」と「<」「>」が表示される。

**ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法**

通話中に [メニュー] キーを押すと、ポップアップメニューが表示され、一覧の中から以下のメニューを選択することによって、以下のように音声出力を切り替えることができる。

- ・「スピーカーフォン ON」…本体のスピーカーから音声が出力される。
- ・「スピーカーフォン OFF」…本体の受話口から音声が出力される。
- ・「[ペアリングした Bluetooth 機器名] を有効化する」…ペアリングした Bluetooth 機器から音声が出力される。