

携帯会社名	docomo
機種名	SAMSUNG SC-01B

**Bluetooth メニューへのたどり着き方**  
Windows ボタンを押すか、画面左上の「スタート」をタップして、「スタートメニュー」を表示。→[設定] →[Bluetooth]

## ペ어링方法

### STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

### STEP 2 画面下側の「デバイス」タブが選択されていることを確認。

Bluetooth メニューを開き、画面下側の「デバイス」タブが選択されていることを確認。

### STEP 3 「新しいデバイスの追加 ...」をタップ。

画面真ん中の四角の枠に表示されている「新しいデバイスの追加 ...」をタップ。

### STEP 4 ペ어링を行う Bluetooth 機器を選択した後、画面右下の [次へ] をタップ。

画面左上の Windows アイコンの右側に「設定」と書かれた下に、「Bluetooth デバイスの選択」と書かれた画面に切り替わる。しばらくすると、画面真ん中の四角の枠に、ペ어링できる Bluetooth 機器の一覧が表示されるので、ペ어링を行う Bluetooth 機器を選択した後、画面右下の [次へ] をタップ。

### STEP 5 画面右下の「詳細設定」をタップ。

しばらくすると、画面の下の方に「デバイスが追加されました『PocketPC が [ペ어링した Bluetooth 機器名] に接続されました。』」と表示されるので、画面右下の「詳細設定」をタップ。

### STEP 6 画面に切り替わる。

画面左上の Windows のアイコンの右側に「設定」と書かれた下に、「パートナーシップの設定」と書かれた画面に切り替わる。「このデバイスから使用するサービスを選択します。」の下の枠の中で、利用したいプロファイルの横にチェック (v) が付いていることを確認。(ハンズフリー通話をする場合…「ハンズフリー」、ステレオヘッドセット利用の場合…「ワイヤレス ステレオ」)

### STEP 7 ペ어링した Bluetooth 機器名が表示されていれば、設定は完了。

画面右下の「保存」をタップ。その後、画面左上の Windows アイコンの右側に「設定」と書かれた下に、「Bluetooth」と書かれた画面の、真ん中の四角の枠に表示されている「接続済み」の下に、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示されていれば、設定は完了。

#### ペ어링した機器の確認方法

Bluetooth メニュー [デバイス] タブの、四角に囲まれた枠の中に表示される。

#### Bluetooth のオン / オフ方法

Bluetooth メニュー [モード] タブ→「Bluetooth をオンにする」の左側のチェックの有無で設定 (V 印のチェックがある場合がオン)

#### Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面の最上部中央に Bluetooth のアイコンが表示される。

#### ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

通話中に、十字キー右上の「-」ボタンを押してメニューを表示。→メニュー一覧にある「5 ハンドフリーをオフ (オン)」を選択することで、本体とヘッドセットを切り替える。

携帯会社名	docomo
機種名	SAMSUNG SC-02B

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体のメニューボタンを押す→[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth 設定]

## ペ어링方法

## STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

## STEP 2 Bluetooth メニューから [デバイス検索] をタップ。

Bluetooth をオンにした状態で、Bluetooth メニューから [デバイス検索] をタップ。

## STEP 3 ペ어링したい機器をタップ。

画面下部の「Bluetooth デバイス」の下に表示された、ペ어링したい機器をタップ。

## STEP 4 表示が出る場合は、[承認] をタップ。

画面中央に「Bluetooth ペ어링の要求 [ペ어링したい Bluetooth 機器名] とペアにするためのパスワードを確認」という表示が出る場合は、[承認] をタップ。

## STEP 5 ペ어링したい機器の名前の下の表示が切り替わり、設定完了。

ペ어링したい機器の名前の下の表示が、「ペ어링中 ...」→「接続中 ...」→「接続」と順番に切り替わり、設定完了。

ペ어링した機器の  
確認方法

「Bluetooth 設定」画面下部、「Bluetooth デバイス」の下に表示される。

Bluetooth の  
オン / オフ方法

Bluetooth メニューの [Bluetooth] の右側のチェックをタップ。  
チェックが緑の場合、Bluetooth オンの状態。

Bluetooth との接続を  
画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetooth アイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との  
通話の切り替え方法

本体画面右下の [Bluetooth] をタップすることで、本体と Bluetooth ヘッドセットの切り替えが可能。