

携帯会社名	docomo
機種名	SHARP SH-02B

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[メニュー] (十字キー真ん中のボタン)→[Life Kit]→[4 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 Bluetooth メニューから、[4 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[4 新規機器登録] を選択。

STEP 3 十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [登録] を選択。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に変わり、真ん中の表示が「登録する機器を登録待機状態にしてください」→「サーチ中」の順に切り替わる。サーチが終わると、一覧にペ어링できる Bluetooth 機器が表示されるので、ペ어링を行う Bluetooth 機器にカーソルを合わせ、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [登録] を選択。

STEP 4 パスキーを入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [決定] を選択。

画面上部に「Bluetooth パスキー入力」と書かれた画面に変わるので、真ん中の入力欄にパスキー「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [決定] を選択。

STEP 5 十字キー真ん中のボタンを押す。

「Bluetooth 認証中。…」→「機器登録しました」の順に画面が切り替わり、その後「通常接続機器に設定しますか？」という画面が表示されるので、[はい] が選択されていることを確認し、十字キー真ん中のボタンを押す。

STEP 6 Bluetooth メニューに戻り、[3 機器リスト・接続・切断] を選択。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に戻るので、[CLR] キー (数字の [2] の上のボタン) を押して、Bluetooth メニューに戻り、[3 機器リスト・接続・切断] を選択。

STEP 7 十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [接続] を選択。

画面上部に「機器リスト・接続・切断」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링した Bluetooth 機器名にカーソルを合わせ、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の [接続] を選択。

STEP 8 画面中央の表示が切り替わり、設定完了。

画面中央の表示が「Bluetooth 接続中 (ダイヤルアップ: 接続待機)」→「Bluetooth 接続しました」の順に切り替わり、設定完了。

ペ어링した機器の
確認方法

Bluetooth メニュー→[3 機器リスト・接続・切断]

Bluetooth の
オン / オフ方法

方法1: Bluetooth メニュー→[5 Bluetooth 電源オン (オフ)]
方法2: 待受画面で数字の [6] キーを長押し

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面上部の左側で Bluetooth のアイコンが点滅。通話中は Bluetooth とスピーカーが組み合わさったアイコンも表示される。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

方法1: 十字キー真ん中のボタンを1秒以上押し続ける
方法2: [サブメニュー] (本体キーの一番右上のカメラボタン)→[6 Bluetooth- 本体切替] を選択

携帯会社名	docomo
機種名	SHARP SH-07B

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[6 便利ツール]→[8 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 Bluetoothメニューから、[5 新規機器登録]を選択。

Bluetoothメニューから、[5 新規機器登録]を選択。

STEP 3 十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の[登録]を選択。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に変わり、真ん中の表示が「登録する機器を登録待機状態にしてください」→「サーチ中」→「機器情報収集中」の順に切り替わる。サーチが終わると、一覧にペ어링できる Bluetooth 機器が表示されるので、ペ어링を行う Bluetooth 機器にカーソルを合わせ、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の[登録]を選択。

STEP 4 パスキーを入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の[決定]を選択。

画面上部に「Bluetooth パスキー入力」と書かれた画面に変わるので、真ん中の入力欄にパスキー「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の[決定]を選択。

STEP 5 十字キー真ん中のボタンを押す。

「[ペ어링を行う Bluetooth 機器名]を Bluetooth 認証中」→「[ペ어링を行う Bluetooth 機器名]を機器登録しました」の順に画面が切り替わり、その後「通常接続機器(オーディオ)に設定しますか?」という画面が表示されるので、[はい]が選択されていることを確認し、十字キー真ん中のボタンを押す。

STEP 6 Bluetoothメニューに戻り、[3 機器リスト・接続・切断]を選択。

画面上部に「新規機器登録」と書かれた画面に戻るので、[CLR]キー(数字の[2]の上のボタン)を押して、Bluetoothメニューに戻り、[4 機器リスト・接続・切断]を選択。

STEP 7 十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の[接続]を選択。

画面上部に「機器リスト・接続・切断」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링した Bluetooth 機器名にカーソルを合わせ、十字キー真ん中のボタンを押して、画面下部の[接続]を選択。

STEP 8 画面中央の表示が切り替わり、設定完了。

画面中央の表示が「[ペ어링した Bluetooth 機器名]に Bluetooth 接続中(ダイヤルアップ:接続待機)」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名]に Bluetooth 接続しました」の順に切り替わり、設定完了。

ペ어링した機器の確認方法

Bluetoothメニュー→[4 機器リスト・接続・切断]

Bluetoothのオン/オフ方法

方法1: Bluetoothメニュー→[6 Bluetooth 電源オン(オフ)]
方法2: 待受画面で数字の[6]キーを長押し

Bluetoothとの接続を画面で確認する方法

画面上部の左側で Bluetooth のアイコンが点滅。
通話中は Bluetooth とスピーカーが組み合わさったアイコンも表示される。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

方法1: 十字キー真ん中のボタンを1秒以上押し続ける
方法2: [サブメニュー]([MENU]ボタンを押して呼出)→[8 Bluetooth(本体)通話切替]を選択

携帯会社名	docomo
機種名	SHARP SH-10B

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メインメニュー [設定] → [通信] → [Bluetooth 設定]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 [Bluetooth 設定] の一覧から、[新規デバイス登録] をタップ。

[Bluetooth 設定] の一覧から、[新規デバイス登録] をタップ。

STEP 3 ポップアップが表示された場合は、[OK] をタップ。

「機器探索を行います。登録機器が待機状態をご確認ください。」というポップアップが表示された場合は、[OK] をタップ。

STEP 4 ペ어링したい機器をタップ。

しばらくすると、Bluetooth 機器をサーチした検索結果の一覧が表示されるので、ペ어링したい機器をタップ。

STEP 5 パスキーを30秒以内に入力後、[OK] をタップ。

「認証処理中 パスキー入力」というポップアップが表示された場合は、ペ어링したい Bluetooth 機器のパスキー「0000」を30秒以内に入力後、[OK] をタップ。「<ペ어링したい Bluetooth 機器の名前>登録中・・・」の表示に切り替わる。

※ 接続する Bluetooth 機器によっては、この手順が表示されない場合もあります。

STEP 6 画面が切り替わる。

「<ペ어링したい Bluetooth 機器の名前>登録中・・・」→「<ペ어링したい Bluetooth 機器の名前>接続中・・・」→「ハンズフリー機能（、オーディオ機能）に接続しました」の順に切り替わる。（※接続している機器の対応プロファイルにより表示が異なる）。

STEP 7 接続したいプロファイルが表示されていれば、設定は完了。

画面上部に「登録機器一覧」と表示された画面に切り替わり、一覧にペ어링した Bluetooth 機器名が表示され、機器名の右下に接続したいプロファイルが表示されていれば、設定は完了。

ペ어링した機器の
確認方法

[Bluetooth 設定] の一覧から [登録機器一覧] を選択。

Bluetooth の
オン/オフ方法

[通信] メニューまたは [Bluetooth メニュー] 一覧の、「Bluetooth」の右にあるチェックボックスをタップし、緑の V（チェック）がついていることを確認する。

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetooth アイコンが表示されます。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

方法1：通話中に、本体の [MENU] ボタンを押し、サブメニューを表示。
サブメニュー一覧から [Bluetooth] をタップ。

方法2：通話中に、[MENU]+[B] キー

画面最上部の右側、「3G」のアイコンの左側に受話器のマークが表示されている時は、
本体スピーカーからのハンズフリー通話となる。