

携帯会社名	docomo
機種名	Sony Ericsson SO-01B (Xperia)

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[メニュー](画面下の一番左のボタン)-[設定]-
[ワイヤレス設定]-[Bluetooth 設定]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 Bluetooth をオンにする。

Bluetooth をオンにする。

STEP 3 ペ어링したい Bluetooth 機器名が表示される。

[Bluetooth 設定] 画面中央の「デバイスのスキャン」の下に、ペ어링したい Bluetooth 機器名が表示される。

STEP 4 ペ어링したい機器をタップ。

画面下部の「Bluetooth 端末」の下に表示された、ペ어링したい機器をタップ。

STEP 5 ペ어링したい機器の名前の下の表示が切り替わり、設定完了。

ペ어링したい機器の名前の下の表示が、「ペアとして設定中 ...」→「接続中 ...」→「携帯電話とメディアの音声に接続 (HFP のみ対応の場合「携帯電話の音声に接続」、A2DP のみ対応の場合「メディアの音声に接続」) と順番に切り替わり、設定完了。

ペ어링した機器の
確認方法

「Bluetooth 設定」画面下部の「Bluetooth 端末」の下に表示される。

Bluetooth の
オン / オフ方法

「ワイヤレス設定」一覧の [Bluetooth]、または「Bluetooth」一覧の [Bluetooth] の右側のチェックをタップ。チェックが緑の場合、Bluetooth オンの状態。

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetooth アイコンが表示される。
通話中は、Bluetooth マークと受話器が組み合わさったアイコンに変わる。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

[メニュー](画面下の一番左のボタン)を押して通話のメニューを開く。→Bluetooth かスピーカーを使用したい場合は、それぞれをタップして青いマークを付け、本体から通話したい場合は青いマークがついている部分をタップしてマークを外す。