

携帯会社名	docomo
機種名	TOSHIBA T-01A

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[スタート] (画面左上) → [設定] → [Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「新しいデバイスの追加 ...」をタップ。

Bluetooth メニュー (画面左上に「Bluetooth」と書かれた画面) の、画面真ん中の四角の枠に表示されている「新しいデバイスの追加 ...」をタップ。

STEP 3 ペ어링を行う Bluetooth 機器をタップした後、画面右下の [次へ] をタップ。

画面左上に「Bluetooth デバイスの選択」と書かれた画面に切り替わるので、画面真ん中の四角の枠に表示されている一覧から、ペ어링を行う Bluetooth 機器をタップした後、画面右下の [次へ] をタップ。

STEP 4 画面右下の [詳細設定] をタップ。

しばらくすると、画面の下の方に「デバイスが追加されました『Pocket PC が [ペ어링した Bluetooth 機器名] に接続されました。』」と表示されている間に、画面右下の [詳細設定] をタップ。

STEP 5 画面右下の [保存] をタップ。

画面左上に「パートナーシップの設定」と書かれた画面に切り替わるので、一覧からペ어링したいプロフィールにチェック (□の中にV印) がついていることを確認し、画面右下の [保存] をタップ (ステレオヘッドセット利用の場合「ワイヤレスステレオ」、ハンズフリー通話の場合「ハンズフリー」)。

STEP 6 ペ어링したい Bluetooth 機器が表示され、設定は完了。

画面左上に「Bluetooth」と書かれた画面に戻り、真ん中の四角の枠に表示されている「接続済み」の下に、ペ어링したい Bluetooth 機器が表示されていれば、設定は完了。

ペ어링した機器の確認方法

Bluetooth メニュー [デバイス] タブの、四角に囲まれた枠の中に表示される。

Bluetooth のオン/オフ方法

Bluetooth メニュー [モード] タブ→「Bluetooth をオンにする」の左側のチェックの有無で設定 (V印のチェックがある場合がオン)

Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面上部にヘッドホンと♪マークが組み合わさったアイコンが表示される。
ハンズフリー接続の際は、通話中の画面右上にヘッドセットのアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

画面右下の [メニュー] をタップ→[ハンズフリーを (オン) オフ] を選択して切替

携帯会社名	docomo
機種名	TOSHIBA T-01B

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[スタートキー] (液晶画面側にある Windows のアイコン) → スタートメニュー [設定] → [Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「新しいデバイスの追加 ...」をタップ。

Bluetooth メニュー (画面左上に「Bluetooth」と書かれた画面) の、画面真ん中の四角の枠に表示されている「新しいデバイスの追加 ...」をタップ。

STEP 3 ペ어링を行う Bluetooth 機器をタップした後、画面右下の [次へ] をタップ。

画面左上に「Bluetooth デバイスの選択」と書かれた画面に切り替わるので、画面真ん中の四角の枠に表示されている一覧から、ペ어링を行う Bluetooth 機器をタップした後、画面右下の [次へ] をタップ。

STEP 4 画面右下の [詳細設定] をタップ。

しばらくすると、画面の下の方に「デバイスが追加されました『Windows phone は [ペ어링した Bluetooth 機器名] と接続されています。』」と表示されている間に、画面右下の [詳細設定] をタップ。

STEP 5 画面右下の [保存] をタップ。

画面左上に「パートナーシップの設定」と書かれた画面に切り替わるので、一覧からペ어링したいプロフィールにチェック (□の中にV印) がついていることを確認し、画面右下の [保存] をタップ (ステレオヘッドセット利用の場合「ワイヤレスステレオ」、ハンズフリー通話の場合「ハンズフリー」)。

STEP 6 ペ어링したい Bluetooth 機器が表示され、設定は完了。

画面左上に「Bluetooth」と書かれた画面に戻り、真ん中の四角の枠に表示されている「接続済み」の下に、ペ어링したい Bluetooth 機器が表示されていれば、設定は完了 (表示されない場合は、<や>をタップして、画面上部の黒い帯の中央に「デバイス」を表示させる)。

ペ어링した機器の
確認方法

Bluetooth メニュー [デバイス] タブの、四角に囲まれた枠の中に表示される。

Bluetooth の
オン / オフ方法

Bluetooth メニュー [モード] タブ → 「Bluetooth をオンにする」の左側のチェックの有無で設定 (V印のチェックがある場合がオン)

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面上部にヘッドホンと♪マークが組み合わさったアイコンが表示される。
ハンズフリー接続の際は、通話中の画面右上にヘッドセットのアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

画面右下のサブメニューボタンから [ハンズフリーを (オン) オフ] を選択して切替