

# SoftBank 001DL ペアリング方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	001DL

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体のメニューボタン→[設定]→[無線とネットワーク] (タップすると、「ワイヤレスとネットワークの設定」メニュー一覧が表示される)→[Bluetooth設定]

## ペアリング方法

### STEP 1 <携帯ユナイト> をペアリングモードにする。

<携帯ユナイト> をペアリングモードにする。

### STEP 2 Bluetooth メニューから [デバイスのスキャン] をタップ。

Bluetooth をオンにした状態で、Bluetooth メニューから [デバイスのスキャン] をタップ。

### STEP 3 <Hearing Aid Phone> をタップ。

画面下部の「Bluetooth 端末」の下に表示された、<Hearing Aid Phone> をタップ。

### STEP 4 <Hearing Aid Phone> の下の表示が順に切り替わり、設定完了。

<Hearing Aid Phone> の下の表示が、「ペアとして設定中 ...」→「ペア設定、非接続」→「接続中 ...」→「携帯電話とメディアの音声に接続」と順番に切り替わり、設定完了。

#### ペアリングした機器の確認方法

「Bluetooth設定」画面下部、「Bluetooth端末」の下に表示される。

#### Bluetooth のオン / オフ方法

「ワイヤレスとネットワークの設定」一覧の[Bluetooth]、またはBluetoothメニュー一覧の[Bluetooth]の右側のチェックをタップ。チェックが青の場合、Bluetoothオンの状態。

#### Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。携帯ユナイトで通話中は、画面左上の電話マークが青色に変わっている（本体で通話中は緑色）。

#### ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

通話中に本体画面左下に表示される、[Bluetooth]をタップして切り替え。「Bluetooth」の下バーが青の場合に、Bluetoothから音声が出力される。

#### 発信音の出力

補聴器から聞こえる。