

# SoftBank 001N ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	001N

Bluetooth メニューへのたどり着き方

「メニュー」（待受画面から十字キー真ん中のボタン）→[ツール]→(2画面目) [6 Bluetooth]

## ペ어링方法

**STEP 1** <携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト>をペ어링モードにする。

**STEP 2** Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録]を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録]を選択。

**STEP 3** 一覧から<Hearing Aid Phone>を選択。

画面中央の文言が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索が完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧から<Hearing Aid Phone>を選択。

**STEP 4** [YES]を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面に変わるので、[YES]を選択。

**STEP 5** パスキーの「0000」を入力後、決定ボタンを押して、画面下部の[確定]を選択。

しばらくすると、画面上部に「機器登録」と書かれた画面の下が、「<Hearing Aid Phone>を登録中」→「Bluetooth パスキーは?」の順に表示が切り替わるので、パスキーの「0000」を入力後、決定ボタンを押して、画面下部の[確定]を選択。

しばらくすると、「<Hearing Aid Phone>を登録中」→「<Hearing Aid Phone> 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

**STEP 6** 一覧から、<Hearing Aid Phone>を選択。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に戻るので、一覧から、<Hearing Aid Phone>を選択。

**STEP 7** [1 ハンズフリー]を選択。

画面上部に、<Hearing Aid Phone>と表示された画面に変わるので、[1 ハンズフリー]を選択。

**STEP 8** 画面が切り替わったら [YES] を選択し、続けて [3 オーディオ] を選択。

しばらくすると、画面中央が「<Hearing Aid Phone>に接続しています」→「<Hearing Aid Phone>と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わるので、[YES]を選択し、画面上部に、<Hearing Aid Phone>が表示された画面に変わるので、[3 オーディオ]を選択。

**STEP 9** 表示が切り替わるので、[NO] を選択し、設定を終了。

しばらくすると、画面中央が「<Hearing Aid Phone>に接続しています」→「<Hearing Aid Phone>と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わるので、[NO]を選択し、設定を終了。

# SoftBank 001N ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	001N

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

「メニュー」（待受画面から十字キー真ん中のボタン）→[ツール]→(2画面目) [6 Bluetooth]

### ペアリングした機器の確認方法

Bluetoothメニューから[1 登録機器リスト]

### Bluetooth のオン / オフ方法

Bluetoothメニューから[3 Bluetooth オン(オフ)]

### Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面の上方の右側で、青色のBluetoothのアイコンが点灯する。  
携帯ユナイトで通話中は、ヘッドホンのアイコンと組み合わされて表示される。

### ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

方法1：本体の電源ボタンの上にある、カメラとWi-Fiのアイコンが印字されているボタンを押して、画面右下の[機能]を選択。→画面中央に表示される「機能メニュー」一覧の[1 通話機切替]を選択。

方法2：ヘッドセットへの切り替え…画面上部のBluetoothアイコンにヘッドホンが表示されるまで、通話ボタンを長押し。  
本体への切替…画面上部のBluetoothアイコンからヘッドホンの表示が消えるまで、通話ボタンを長押し。

### 発信音の出力

携帯電話から聞こえる。