

# SoftBank 001P ペアリング方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	001P

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[ツール]→十字キー右ボタンで1つ右の画面に移動させた後 [Bluetooth]

## ペアリング方法

**STEP 1** <携帯ユナイト>をペアリングモードにする。

<携帯ユナイト>をペアリングモードにする。

**STEP 2** Bluetooth メニュー一覧から、[1 検索・登録デバイスリスト]を選択。

Bluetooth メニュー一覧から、[1 検索・登録デバイスリスト]を選択。

**STEP 3** [YES]を選択。

「デバイスが登録されていません 検索しますか?」という画面が表示されるので、[YES]を選択（あらかじめ機器が登録されている場合は、表示されない）。

**STEP 4** 一覧から<Hearing Aid Phone>を選択。

画面上部に「検索」、画面中央に「デバイス検索中 ○件検索」→「デバイス名称取得中」→「デバイス検索完了しました ○件見つかりました」の順に表示が切り替わり、画面上部に「検索・登録デバイスリスト」と書かれた画面に変わるので、一覧から<Hearing Aid Phone>を選択。

**STEP 5** [YES]を選択。

「未登録デバイスです 登録しますか?」と書かれた画面に変わるので、[YES]を選択。

**STEP 6** 携帯電話本体の端末暗証番号を入力した後、十字キー真ん中のボタンを押し、画面下部の[確定]を選択。

画面上部に「デバイス登録」と書かれた画面に変わり、「端末暗証番号入力」という表示が画面中ほどに出てくるので、携帯電話本体の端末暗証番号（初期設定は「9999」）を入力した後、十字キー真ん中のボタンを押し、画面下部の[確定]を選択。

**STEP 7** 入力欄にパスキーの「0000」を入力後、[確定]を選択。

画面中央の表示が、「<Hearing Aid Phone>を登録中」→「Bluetooth パスキー」の順に変わるので、「Bluetooth パスキーを入力してください」と書かれた下の入力欄にパスキーの「0000」を入力後、[確定]を選択。

**STEP 8** 画面中央の表示が変わる。

画面中央の表示が、「<Hearing Aid Phone>を登録中」→「<Hearing Aid Phone>デバイス登録完了しました」の順に変わる。

**STEP 9** [1 ハンズフリー]を選択。

画面上部に、<Hearing Aid Phone>と表示された画面に変わるので、[1 ハンズフリー]を選択。

**STEP 10** 画面が切り替わったら [YES] を選択し、続けて [3 オーディオ] を選択。

しばらくすると、画面中央が「<Hearing Aid Phone>に接続しています」→「<Hearing Aid Phone>と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わるので、[YES]を選択し、画面上部に、<Hearing Aid Phone>が表示された画面に変わるので、[3 オーディオ]を選択。

**STEP 11** [NO]を選択し、設定を終了。

しばらくすると、画面中央が「<Hearing Aid Phone>に接続しています」→「<Hearing Aid Phone>と接続しました 別のサービスにも接続しますか?」の順に表示が切り替わるので、[NO]を選択し、設定を終了。

# SoftBank 001P ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	001P

## Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[ツール]→十字キー右ボタンで1つ右の画面に移動させた後 [Bluetooth]

**ペアリングした機器の確認方法** Bluetoothメニュー→[1 検索・登録デバイスリスト]

**Bluetooth のオン / オフ方法** Bluetoothメニュー→[2 Bluetooth ON(OFF)]

**Bluetooth との接続を画面で確認する方法** 画面の上方の左側にBluetoothのアイコンが点灯。

**ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法**

- ・ヘッドセットへの切替…  
方法1：画面上部のBluetoothアイコンにヘッドホンが表示されるまで、通話ボタンを長押し。  
方法2：[メニュー] → [2 通話機切替] → [1 Bluetooth]
- ・本体への切替…  
方法1：画面上部のBluetoothアイコンからヘッドホンの表示が消えるまで、通話ボタンを長押し。  
方法2：[メニュー] → [2 通話機切替] → [2 本体通話]

**発信音の出力** 携帯電話から聞こえる。