

SoftBank 002SH ペ어링方法

| | |
|-------|----------|
| 携帯会社名 | SoftBank |
| 機種名 | 002SH |

Bluetooth メニューへのたどり着き方
メニュー→[ツール]→一番左の「P I M・生活」から十字キーで画面上部のタブを移動し、一番右の「外部接続」に切り替えた後、一覧から [Bluetooth] を選択。

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

STEP 2 Bluetooth メニューから [デバイス登録] を選択。

Bluetooth メニューから [デバイス登録] を選択。

STEP 3 ポップアップが表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

「Bluetooth デバイスを登録 (ペ어링) 待機状態にしてください。操作方法は Bluetooth デバイスの取扱説明書をご確認ください。」と書かれたポップアップが表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。(「登録候補一覧」が表示される場合は、[メール] ボタンを押して、画面左下の「再検索」を選択。)

STEP 4 一覧から <Hearing Aid Phone> を選択。

画面中央に「登録候補 検索中…」としばらく表示された後、画面上部に「登録候補一覧」と書かれた画面に変わるので、一覧から <Hearing Aid Phone> を選択。

STEP 5 画面中央の表示が切り替わるので、十字キー真ん中のボタンを押して [はい] を選択。

画面中央の表示が「しばらくお待ちください」→「<Hearing Aid Phone> デバイスリストに加えますか？」の順に切り替わるので、十字キー真ん中のボタンを押して [はい] を選択。

STEP 6 画面中央に「オーディオ出力を Bluetooth デバイスに設定しました」と表示される。

画面中央の表示が「登録中…」→「<Hearing Aid Phone> 接続中…」→「ハンズフリー機能 オーディオ機能 接続しました」→「オーディオ出力を Bluetooth デバイスに設定しました」と表示される。

STEP 7 機器名の右下に「接続中」と表示され、設定完了。

画面上部に「登録済みデバイス」と表示された画面に切り替わる。一覧に <Hearing Aid Phone> が表示され、機器名の右下に「接続中」と表示されていれば、設定完了。

SoftBank 002SH ペ어링方法

| | |
|-------|----------|
| 携帯会社名 | SoftBank |
| 機種名 | 002SH |

Bluetooth メニューへのたどり着き方
メニュー→[ツール]→一番左の「P I M・生活」から十字キーで画面上部のタブを移動し、一番右の「外部接続」に切り替えた後、一覧から [Bluetooth] を選択。

| | |
|--------------------------|--|
| ペアリングした機器の確認方法 | Bluetoothメニューから [登録済みデバイス] |
| Bluetooth のオン / オフ方法 | 方法1 : Bluetoothメニューから [On / Off設定] 方法2 : 待受画面表示中に十字キー左を長押し |
| Bluetooth との接続を画面で確認する方法 | 画面最上部にBluetoothのアイコンが表示される。通話中はヘッドホンのアイコン、音楽再生中はヘッドホンと♪が組み合わさったアイコンが表示される。 |
| ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法 | 1. 通話中に[メール]ボタン（キーボード最上段の封筒のマークのボタン）を押して、画面左下の [メニュー] を選択。 2. 表示されたメニュー一覧から [音声切替] を選択。 3. 「音声切替」と書かれた画面が表示された後、[本体] または [Bluetooth] を選択。 4. Bluetoothに切り替える場合は、その後、<Hearing Aid Phone>を選択する。 |
| 発信音の出力 | 携帯電話から聞こえる。 |

SoftBank 003SH ペ어링方法

| | |
|-------|----------|
| 携帯会社名 | SoftBank |
| 機種名 | 003SH |

Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体の [MENU] ボタン→[端末設定]→[無線とネットワーク] (タップすると、「ワイヤレスとネットワークの設定」メニュー一覧が表示される)→[Bluetooth設定]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

STEP 2 「Bluetooth 設定」の一覧から、[新規デバイス登録] をタップ。

「Bluetooth 設定」の一覧から、[新規デバイス登録] をタップ。

※「機器探索を行います。登録機器が待機状態かご確認ください。」というポップアップが表示された場合は、[OK] をタップ。

STEP 3 <Hearing Aid Phone> をタップ。

画面上部に「検索中・・・○件」→「検索結果」と表示され、Bluetooth 機器をサーチした検索結果の一覧が表示されるので、<Hearing Aid Phone> をタップ。

STEP 4 画面が順に切り替わる。

「しばらくお待ちください」→「<Hearing Aid Phone> 接続中・・・」→「ハンズフリー機能、オーディオ機能に接続しました」の順に切り替わる。

STEP 5 機器名の右下に接続したいプロフィールが表示され、設定は完了。

画面上部に「登録機器一覧」と表示された画面に切り替わり、一覧に <Hearing Aid Phone> が表示され、機器名の右下に接続したいプロフィールが表示されていれば、設定は完了。

ペ어링した機器の確認方法

Bluetoothメニューから [登録機器一覧]

Bluetooth のオン / オフ方法

「ワイヤレスとネットワークの設定」一覧の [Bluetooth]、または「Bluetooth設定」一覧の [Bluetooth] の右側のチェックをタップ。チェックが青の場合、Bluetoothオンの状態。

Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。携帯ユナイトで通話中は、画面左上の電話マークが青色に変わっている（本体で通話中は緑色）。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

通話中に、本体の[MENU]ボタンを押して表示されるメニューから、[Bluetooth ON (OFF)]をタップすることで、本体とBluetoothヘッドセットの音声を切り替え。

発信音の出力

携帯電話から聞こえる。

SoftBank 004SH ペ어링方法

| | |
|-------|----------|
| 携帯会社名 | SoftBank |
| 機種名 | 004SH |

Bluetooth メニューへのたどり着き方
メニュー→[ツール]→一番左の「PIM・生活」から十字キーで画面上部のタブを移動し、一番右の「外部接続」に切り替えた後、一覧から [Bluetooth] を選択。

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

STEP 2 Bluetooth メニューから [デバイス登録] を選択。

Bluetooth メニューから [デバイス登録] を選択。

STEP 3 ポップアップが表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

「Bluetooth デバイスを登録 (ペ어링) 待機状態にしてください。操作方法は Bluetooth デバイスの取扱説明書をご確認ください。」と書かれたポップアップが表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。(「登録候補一覧」が表示される場合は、[メール] ボタンを押して、画面左下の「再検索」を選択。)

STEP 4 一覧から <Hearing Aid Phone> を選択。

画面中央に「登録候補 検索中…」としばらく表示された後、画面上部に「登録候補一覧」と書かれた画面に変わるので、一覧から <Hearing Aid Phone> を選択。

STEP 5 画面中央の表示が切り替わるので、十字キー真ん中のボタンを押して [はい] を選択。

画面中央の表示が「しばらくお待ちください」→「<Hearing Aid Phone> デバイスリストに加えますか？」の順に切り替わるので、十字キー真ん中のボタンを押して [はい] を選択。

STEP 6 画面中央に「オーディオ出力を Bluetooth デバイスに設定しました」と表示される。

画面中央の表示が「登録中…」→「<Hearing Aid Phone> 接続中…」→「ハンズフリー機能 オーディオ機能 接続しました」→「オーディオ出力を Bluetooth デバイスに設定しました」と表示される。

STEP 7 機器名の右下に「接続中」と表示され、設定完了。

画面上部に「登録済みデバイス」と表示された画面に切り替わり、一覧に <Hearing Aid Phone> が表示され、機器名の右下に「接続中」と表示されていれば、設定完了。

SoftBank 004SH ペ어링方法

| | |
|-------|----------|
| 携帯会社名 | SoftBank |
| 機種名 | 004SH |

Bluetooth メニューへのたどり着き方
メニュー→[ツール]→一番左の「PIM・生活」から十字キーで画面上部のタブを移動し、一番右の「外部接続」に切り替えた後、一覧から [Bluetooth] を選択。

ペアリングした機器の確認方法

Bluetoothメニューから [登録済みデバイス]

Bluetooth のオン / オフ方法

方法1 : Bluetoothメニューから [On / Off設定]

方法2 : 待受画面表示中に十字キー左を長押し

Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面最上部にBluetoothのアイコンが表示される。通話中はヘッドホンのアイコン、音楽再生中はヘッドホンと♪が組み合わさったアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

1. 通話中に[メール]ボタン（キーボード最上段の封筒のマークのボタン）を押して、画面左下の[メニュー]を選択。
2. 表示されたメニュー一覧から[音声切替]を選択。
3. 「音声切替」と書かれた画面が表示された後、[本体]または[Bluetooth]を選択。
4. Bluetoothに切り替える場合は、その後、<Hearing Aid Phone>を選択する。

発信音の出力

携帯電話から聞こえる。

SoftBank 005SH ペ어링方法

| | |
|-------|----------|
| 携帯会社名 | SoftBank |
| 機種名 | 005SH |

Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面で本体の [MENU] ボタン→[端末設定]→[無線とネットワーク] (タップすると、「ワイヤレスとネットワークの設定」メニュー一覧が表示される)→[Bluetooth 設定]

ペ어링方法

STEP 1 <携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

<携帯ユナイト> をペ어링モードにする。

STEP 2 「Bluetooth 設定」の一覧から、[新規デバイス登録] をタップ。

「Bluetooth 設定」の一覧から、[新規デバイス登録] をタップ。

STEP 3 ポップアップが表示された場合は、[OK] をタップ。

「機器探索を行います。登録機器が待機状態かご確認ください。」というポップアップが表示された場合は、[OK] をタップ。

STEP 4 <Hearing Aid Phone> をタップ。

しばらくすると、Bluetooth 機器をサーチした検索結果の一覧が表示されるので、<Hearing Aid Phone> をタップ。

STEP 5 画面が順に切り替わる。

「しばらくお待ちください」→「<Hearing Aid Phone> 接続中・・・」→「ハンズフリー機能、オーディオ機能に接続しました」の順に切り替わる。

STEP 6 機器名の右下に接続したいプロファイルが表示され、設定完了。

画面上部に「登録機器一覧」と表示された画面に切り替わり、一覧に <Hearing Aid Phone> が表示され、機器名の右下に接続したいプロファイルが表示されていれば、設定は完了。

ペ어링した機器の確認方法

Bluetoothメニューから [登録機器一覧]

Bluetooth のオン / オフ方法

「ワイヤレスとネットワークの設定」一覧の [Bluetooth]、または「Bluetooth設定」一覧の [Bluetooth] の右側のチェックをタップ。チェックが青の場合、Bluetoothオンの状態。

Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetoothアイコンが表示される。携帯ユナイトで通話中は、画面左上の電話マークが青色に変わっている（本体で通話中は緑色）。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

通話中に、本体の[MENU]ボタンを押して表示されるメニューから、[Bluetooth ON (OFF)]をタップすることで、本体とBluetoothヘッドセットの音声を切り替え。

発信音の出力

携帯電話から聞こえる。