

SoftBank X06HT/X06HTII ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	HTC X06HT/X06HTII

Bluetooth メニューへのたどり着き方

ホーム画面から [アプリケーションバー] (画面下部の▲のアイコン) をタッチ→[設定]→[無線とネットワーク]→[Bluetooth 設定]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 Bluetooth メニューから [デバイス検索] をタップ。

Bluetooth をオンにした状態で、Bluetooth メニューから [デバイス検索] をタップ。

STEP 3 ペ어링したい機器をタップ。

画面下部の「Bluetooth デバイス」の下に表示された、ペ어링したい機器をタップ。

STEP 4 表示が切り替わり、設定完了。

ペ어링したい機器の名前の下の表示が、「ペアとして設定中 ...」→「接続中 ...」→「携帯電話とメディアの音声に接続 (HFP のみ対応の場合「携帯電話の音声に接続」、A2DP のみ対応の場合「メディアの音声に接続」) と順番に切り替わり、設定完了。

ペ어링した機器の 確認方法

「Bluetooth 設定」画面下部、「Bluetooth デバイス」の下に表示される。

Bluetooth の オン / オフ方法

「無線とネットワーク」一覧の [Bluetooth]、または「Bluetooth」一覧の [Bluetooth] の右側のチェックをタップ。チェックが緑の場合、Bluetooth オンの状態。

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面の最上部の真ん中に、Bluetooth アイコンが表示される。Bluetooth ヘッドセットで通話中は、画面左上の電話マークが青色に変わっている (本体で通話中は緑色)。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

本体の [MENU] ボタンを押して、通話のメニューを開く。→画面左下の [BT ヘッドセット] をタップすることで、本体と Bluetooth ヘッドセットの切り替えが可能。