

SoftBank iPhone 3GS ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	Apple iPhone 3GS

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[設定]→[一般]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「Bluetooth」画面の「Bluetooth」の項目を、「オフ」から「オン」に切り替える。

「Bluetooth」画面の「Bluetooth」の項目を、「オフ」から「オン」にスライドして切り替える。

STEP 3 「[ペ어링する Bluetooth 機器名] 登録なし」と表示されるのでタップする。

しばらくすると、「デバイス」の一覧に「[ペ어링する Bluetooth 機器名] 登録なし」と表示されるのでタップ。

STEP 4 「0000」を入力し、画面右上の「接続」をタップ。

画面上部に「PIN を入力」という画面が表示されるので、30秒以内に「0000」を入力し、画面右上の「接続」をタップ。※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示がされない場合があります。

STEP 5 「デバイス」の一覧に「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 登録済み」と表示されるのを確認し終了。

しばらくすると、画面上部に「Bluetooth」と書かれた画面に戻るので、「デバイス」の一覧に「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 登録済み」と表示されるのを確認。

ペ어링した機器の 確認方法

[Bluetooth] の画面の「デバイス一覧」に表示される。

Bluetooth の オン / オフ方法

[Bluetooth] の画面で、「Bluetooth」の横のスイッチを指でスライドして、「オン (またはオフ)」を切り替える。

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面右上に Bluetooth のアイコンが表示される。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

通話中は、画面に [Bluetooth 機器][iPhone][スピーカーフォン] のボタンが表示されるので、タップして切替す。選択した機能のボタン内の右側に、スピーカーのアイコンが表示される。

SoftBank iPhone 4 ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	Apple iPhone 4

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[設定]→[一般]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「Bluetooth」の項目を、「オフ」から「オン」にスライドして切り替える。

「Bluetooth」画面の「Bluetooth」の項目を、「オフ」から「オン」にスライドして切り替える。

STEP 3 に「[ペ어링する Bluetooth 機器名] 登録なし」と表示されるのでタップ。

しばらくすると、「デバイス」の一覧に「[ペ어링する Bluetooth 機器名] 登録なし」と表示されるのでタップ。

STEP 4 「0000」を入力し、画面右上の「接続」をタップ。

画面上部に「PINを入力」という画面が表示されるので、30秒以内に「0000」を入力し、画面右上の「接続」をタップ。※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示がされない場合があります。

STEP 5 「デバイス」の一覧に「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 登録済み」と表示されるのを確認。

しばらくすると、画面上部に「Bluetooth」と書かれた画面に戻るので、「デバイス」の一覧に「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 登録済み」と表示されるのを確認。

ペ어링した機器の確認方法

[Bluetooth]の画面の「デバイス一覧」に表示される。

Bluetoothのオン/オフ方法

[Bluetooth]の画面で、「Bluetooth」の横のスイッチを指でスライドして、「オン(またはオフ)」を切り替える。

Bluetoothとの接続を画面で確認する方法

«ペ어링したい Bluetooth 機器を、あらかじめペ어링モードにします。»

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

1. メニューから「設定」をタップします。
2. 画面上部に「設定」と書かれた画面が変わるので、「一般」をタップします。
3. 画面上部に「一般」と書かれた画面が変わるので、「Bluetooth」をタップします。
4. 画面上部に「Bluetooth」と書かれた画面が変わるので、「Bluetooth」の項目を「オフ」から「オン」にスライドして切り替えます。
5. しばらくすると、「デバイス」の一覧に「[ペ어링する Bluetooth 機器名] 登録なし」と表示されるので、タップします。
6. 画面上部に「[ペ어링する Bluetooth 機器名]のPINを入力」という画面が表示されるので、「0000」を入力し、画面右上の「接続」をタップします。※接続する機器によっては、パスキー入力画面が表示がされない場合があります。
7. しばらくすると、画面上部に「Bluetooth」と書かれた画面に戻るので、「デバイス」の一覧に「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 接続されました」と表示されるのを確認します。

これで設定は完了です。

画面右上に Bluetooth のアイコンが表示される。

通話中は、画面に [Bluetooth 機器][iPhone][スピーカーフォン]のボタンが表示されるので、タップして切替す。選択した機能のボタン内の右側に、スピーカーのアイコンが表示される。