

# SoftBank DM005SH ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	SHARP DM005SH

**Bluetooth メニューへのたどり着き方**  
メニュー→[ツール]→一番左の「PIM・生活」から十字キーで画面上部のタブを移動し、一番右の「外部接続」に切り替えた後、一覧から [Bluetooth] を選択。

## ペ어링方法

### STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押し)

### STEP 2 Bluetooth メニューから [デバイス登録] を選択。

Bluetooth メニューから [デバイス登録] を選択。

### STEP 3 ポップアップが表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。

「Bluetooth デバイスを登録 (ペ어링) 待機状態にしてください。操作方法は Bluetooth デバイスの取扱説明書をご確認ください。」と書かれたポップアップが表示される場合は、十字キー真ん中のボタンを押して [OK] を選択。(「登録候補一覧」が表示される場合は、[メール] ボタンを押して、画面左下の「再検索」を選択。)

### STEP 4 ペ어링する Bluetooth 機器を選択。

画面中央に「登録候補 検索中…」としばらく表示された後、画面上部に「登録候補一覧」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링する Bluetooth 機器を選択。

### STEP 5 パスキーを入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、[OK] を選択。

画面上部に「登録用パスキー入力」と書かれた画面の「4～16桁の数字(パスキー)を入力してください」と書かれた欄にパスキー「0000」を入力後、十字キー真ん中のボタンを押して、[OK] を選択。※パスキーを入力する必要が無い機器は、この画面が表示される代わりに、画面中央の表示が「しばらくお待ちください」→「<ペ어링する Bluetooth 機器名> デバイスリストに加えますか?」の順に切り替わるので、十字キー真ん中のボタンを押して [はい] を選択。

### STEP 6 画面中央の表示が「ハンズフリー機能 (オーディオ機能) 接続しました」に切り替わる。

画面中央の表示が「登録中…」→「<ペ어링する Bluetooth 機器名> 接続中…」→「ハンズフリー機能 (オーディオ機能) 接続しました」の順に切り替わる (オーディオ機能に接続した場合は、その後「オーディオ出力を Bluetooth デバイスに設定しました」と表示される)。

### STEP 7 「接続中」と表示されていれば、設定完了。

画面上部に「登録済みデバイス」と表示された画面に切り替わる。一覧に、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示され、機器名の右下に「接続中」と表示されていれば、設定完了。

#### ペ어링した機器の確認方法

Bluetooth メニューから [登録済みデバイス]

#### Bluetooth のオン/オフ方法

方法1: Bluetooth メニューから [On/Off 設定]  
方法2: 待受画面表示中に十字キー左を長押し

#### Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面最上部に Bluetooth のアイコンが表示されます。通話中はヘッドホンのアイコンが表示されます。

#### ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

- 通話中に [メール] ボタン (キーボード最上段の封筒のマークのボタン) を押すことで、画面左下の「メニュー」を選択。
- 表示されたメニュー一覧から [音声切替] を選択。
- 「音声切替」と書かれた画面が表示された後、[本体] または [Bluetooth] を選択。
- Bluetooth に切り替える場合は、その後、接続した Bluetooth 機器名を選択する。