

SoftBank 841N ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	NEC 841N

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[ツール]→十字キー右ボタンで1つ右の画面に移動させた後 [4 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

STEP 3 ペ어링する Bluetooth 機器を選択。

画面中央の文言が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索が完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링する Bluetooth 機器を選択。

STEP 4 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面に変わるので、[YES] を選択。

STEP 5 画面が切り替わる。

しばらくすると、画面上部に「機器登録」と書かれた画面の下が、「[ペ어링する Bluetooth 機器名] を登録中」→「Bluetooth パスキーは?」の順に表示が切り替わるので、パスキー「0000」を入力後、決定ボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。しばらくすると、「[ペ어링する Bluetooth 機器名] を登録中」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

STEP 6 ペ어링した Bluetooth 機器を選択。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に戻るので、一覧から、ペ어링した Bluetooth 機器を選択。

STEP 7 接続したいプロフィールを選択。

画面上部に、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示された画面に変わるので、接続したいプロフィールを選択。(ハンズフリー通話の場合…「1 ハンズフリー」、ステレオヘッドセット利用の場合…「3 オーディオ」)

STEP 7 全てのプロフィールの接続を終えた場合は [NO] すると、待受画面に戻り、設定完了。

しばらくすると、「[ペ어링した Bluetooth 機器名] に接続しています」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] と接続しました別のサービスにも接続しますか?」の順に画面の表示が切り替わる。他にも接続するプロフィールがある場合は [YES] を選択し、この操作を繰り返す。全てのプロフィールの接続を終えた場合は [NO] すると、待受画面に戻り、設定完了。

ペ어링した機器の確認方法

Bluetooth メニュー→[1 登録機器リスト]

Bluetooth のオン/オフ方法

Bluetooth メニュー→[3 Bluetooth オン(オフ)]

Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面の上方の右側で、青色の Bluetooth のアイコンが点灯。
通話中は、ヘッドホンのアイコンと組み合わせられて表示される。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

方法1：通話ボタン(数字の1の上のボタン)を1秒以上押し続けて切替。
方法2：[機能]→[1 通話機切替]

SoftBank 930N ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	NEC 930N

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[ツール]- 十字キー右ボタンで
1 つ右の画面に移動させた後 [6 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを 7 秒間押す)

STEP 2 [2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

STEP 3 ペ어링する Bluetooth 機器を選択。

画面中央の文言が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索が完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링する Bluetooth 機器を選択。

STEP 4 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面に変わるので、[YES] を選択。

STEP 5 画面が切り替わる。

しばらくすると、画面上部に「機器登録」と書かれた画面の下が、「[ペ어링する Bluetooth 機器名] を登録中」→「Bluetooth パスキーは?」の順に表示が切り替わるので、パスキー「0000」を入力後、決定ボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。しばらくすると、「[ペ어링する Bluetooth 機器名] を登録中」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

STEP 6 一覧から、ペ어링した Bluetooth 機器を選択。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に戻るので、一覧から、ペ어링した Bluetooth 機器を選択。

STEP 7 接続したいプロファイルを選択。

画面上部に、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示された画面に変わるので、接続したいプロファイルを選択。(ハンズフリー通話の場合…「1 ハンズフリー」、ステレオヘッドセット利用の場合…「3 オーディオ」)

STEP 8 全てのプロファイルの接続を終えた場合は [NO] すると、待受画面に戻る。

しばらくすると、「[ペ어링した Bluetooth 機器名] に接続しています」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] と接続しました別のサービスにも接続しますか?」の順に画面の表示が切り替わる。他にも接続するプロファイルがある場合は [YES] を選択し、この操作を繰り返す。全てのプロファイルの接続を終えた場合は [NO] すると、待受画面に戻る。

ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニューから [1 登録機器リスト]

Bluetooth の オン / オフ方法

Bluetooth メニューから [3 Bluetooth オン (オフ)]

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面の上方の右側で、青色の Bluetooth のアイコンが点灯します。
通話中は、ヘッドホンのアイコンと組み合わせられて表示されます。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

通話ボタン (数字の 1 の上のボタン) を 1 秒以上押し続けて切り替えます。

SoftBank 931N ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	NEC 931N

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[ツール]-十字キー右ボタンで
1 つ右の画面に移動させた後 [5 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを 7 秒間押す)

STEP 2 Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

Bluetooth メニューから、[2 新規機器登録] を選択。

STEP 3 ペ어링する Bluetooth 機器を選択。

画面中央の文言が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索が完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링する Bluetooth 機器を選択。

STEP 4 [YES] を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面に変わるので、[YES] を選択。

STEP 5 画面が切り替わる。

しばらくすると、画面上部に「機器登録」と書かれた画面の下が、「[ペ어링する Bluetooth 機器名] を登録中」→「Bluetooth パスキーは?」の順に表示が切り替わるので、パスキー「0000」を入力後、決定ボタンを押して、画面下部の [確定] を選択。しばらくすると、「[ペ어링する Bluetooth 機器名] を登録中」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] 機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

STEP 6 ペ어링した Bluetooth 機器を選択。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に戻るので、一覧から、ペ어링した Bluetooth 機器を選択。

STEP 7 接続したいプロファイルを選択。

画面上部に、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示された画面に変わるので、接続したいプロファイルを選択。(ハンズフリー通話の場合…「1 ハンズフリー」、ステレオヘッドセット利用の場合…「3 オーディオ」)

STEP 8 全てのプロファイルの接続を終えた場合は [NO] すると、待受画面に戻る。

しばらくすると、「[ペ어링した Bluetooth 機器名] に接続しています」→「[ペ어링した Bluetooth 機器名] と接続しました別のサービスにも接続しますか?」の順に画面の表示が切り替わる。他にも接続するプロファイルがある場合は [YES] を選択し、この操作を繰り返す。全てのプロファイルの接続を終えた場合は [NO] すると、待受画面に戻る。

ペ어링した機器の 確認方法

Bluetooth メニューから [1 登録機器リスト]

Bluetooth の オン / オフ方法

Bluetooth メニューから [3 Bluetooth オン (オフ)]

Bluetooth との接続を 画面で確認する方法

画面の上方の右側で、青色の Bluetooth のアイコンが点灯します。
通話中は、ヘッドホンのアイコンと組み合わせられて表示されます。

ヘッドセットと本体との 通話の切り替え方法

通話ボタン (数字の 1 の上のボタン) を 1 秒以上押し続けて切り替えます。

SoftBank 940N ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	NEC 940N

Bluetooth メニューへのたどり着き方

[MENU] ボタン→[ツール]→[6 Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 Bluetoothメニューから、[2 新規機器登録]を選択。

Bluetoothメニューから、[2 新規機器登録]を選択。

STEP 3 一覧からペ어링するBluetooth機器を選択。

画面中央の文言が「機器検索中 ○件検索」→「機器名称取得中」→「機器検索が完了しました ○件見つかりました」の順に切り替わった後、画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に変わるので、一覧からペ어링するBluetooth機器を選択。

STEP 4 [YES]を選択。

「未登録機器です 登録しますか?」と書かれた画面に変わるので、[YES]を選択。

STEP 5 画面が切り替わる。

しばらくすると、画面上部に「機器登録」と書かれた画面の下が、「[ペ어링するBluetooth機器名]を登録中」→「Bluetoothパスキーは?」の順に表示が切り替わるので、パスキー「0000」を入力後、決定ボタンを押して、画面下部の[確定]を選択。しばらくすると、「[ペ어링するBluetooth機器名]を登録中」→「[ペ어링したBluetooth機器名]機器登録完了しました」の順に画面が切り替わる。

STEP 6 ペ어링したBluetooth機器を選択。

画面上部に「登録機器リスト」と書かれた画面に戻るので、一覧から、ペ어링したBluetooth機器を選択。

STEP 7 接続したいプロファイルを選択。

画面上部に、ペ어링したBluetooth機器名が表示された画面に変わるので、接続したいプロファイルを選択。(ハンズフリー通話の場合…「1 ハンズフリー」、ステレオヘッドセット利用の場合…「3 オーディオ」)

STEP 8 全てのプロファイルの接続を終えた場合は[NO]すると、待受画面に戻る。

しばらくすると、「[ペ어링したBluetooth機器名]に接続しています」→「[ペ어링したBluetooth機器名]と接続しました別のサービスにも接続しますか?」の順に画面の表示が切り替わる。他にも接続するプロファイルがある場合は[YES]を選択し、この操作を繰り返す。全てのプロファイルの接続を終えた場合は[NO]すると、待受画面に戻る。

ペ어링した機器の確認方法

Bluetoothメニューから[1 登録機器リスト]

Bluetoothのオン/オフ方法

Bluetoothメニューから[3 Bluetooth オン(オフ)]

Bluetoothとの接続を画面で確認する方法

画面の上方の右側で、青色のBluetoothのアイコンが点灯します。
通話中は、ヘッドホンのアイコンと組み合わされて表示されます。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

通話ボタン(数字の1の上のボタン)を1秒以上押し続けて切り替えます。