

SoftBank 830SC ペ어링方法

| | |
|-------|---------------|
| 携帯会社名 | SoftBank |
| 機種名 | SAMSUNG 830SC |

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[設定]→[外部接続]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「2 周辺機器検索」を選択。

「2 周辺機器検索」を選択。

STEP 3 ペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

画面上部に「周辺機器検索」と書かれた画面に変わるので、「周辺デバイス検索」を選択。しばらく、画面上部に「検索中…」と表示された後、周辺機器の一覧が表示されるので、一覧からペ어링を行う Bluetooth 機器を選択。

STEP 4 画面が切り替わる。

画面下部に「認証コード」という画面が表示されるので、30秒以内に「0000」を入力し、十字キー真ん中のボタンを押す。「[ペ어링した Bluetooth 機器名] ペ어링しました」→「サービスリストを取得中…」→「オーディオが接続されました」と、順番に画面が切り替わる。

STEP 5 一覧に「Bluetooth 機器」が表示されているのを確認。

画面上部に「登録済みデバイス」と書かれた画面に変わるので、一覧に「Bluetooth 機器」が表示されているのを確認。

STEP 6 接続している Bluetooth 機器を選択します。

音楽やワンセグ、動画を視聴する際に、オーディオの音声を Bluetooth 機器から出力させる場合は、再生中にメニュー→[3 ヘッドフォンに接続]、「登録済みデバイス」の一覧から接続している Bluetooth 機器を選択。

ペ어링した機器の
確認方法

Bluetooth メニューから [3 登録済みデバイス]

Bluetooth の
オン / オフ方法

Bluetooth メニューから [1 Bluetooth On/Off 設定]→[On(Off)] をタップ

Bluetooth との接続を
画面で確認する方法

画面の上部中央に Bluetooth のアイコンが表示される。
ヘッドセットと接続している時は、ヘッドホンのアイコンと組み合わさって表示される。

ヘッドセットと本体との
通話の切り替え方法

1. 数字の3のボタンの3つ上にあるボタン（一番右上のボタン）を押します。（これで画面右下の「メニュー」を選択したことになります。）
2. 画面が切り替わりましたら、「1. 本体に切替」（「2. ヘッドセットに切替」）を選択することで、本体とヘッドセットの音声を切り替えることができます。

SoftBank 931SC ペ어링方法

| | |
|-------|---------------|
| 携帯会社名 | SoftBank |
| 機種名 | SAMSUNG 931SC |

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[設定]→[外部接続]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 ペ어링したい Bluetooth 機器を画面中央の携帯電話のアイコンへドラッグ & ドロップ。

液晶の下の左から2番目に表示されている [デバイス検索] をタップ。しばらくすると、Bluetooth 機器の名前が表示されたアイコンが表示されるので、ペ어링したい Bluetooth 機器を画面中央の携帯電話のアイコンへドラッグ & ドロップ。

STEP 3 パスキーを入力して、画面左下の [OK] をタップ。

液晶にダイヤルキーが表示されるので、30秒以内にパスキー「0000」を入力して、画面左下の [OK] をタップ。

STEP 4 画面が切り替わる。

しばらくすると、「接続中…」→「サービスリストを取得中…」→「接続中…」→「ハンズフリーが接続されました」の順に画面が切り替わる。

STEP 5 アイコンが水色の点線で結ばれているのを確認。

画面中央の携帯電話のアイコンとペ어링した Bluetooth 機器名が表示されたアイコンが水色の点線で結ばれているのが確認できたら、設定は完了。

STEP 6 緑色のチェックアイコンが表示されていれば設定は完了。

その後、オーディオをあらかじめ Bluetooth 機器から出力するように設定する場合は、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示されたアイコンをタップ。表示されるポップアップの一覧から [優先オーディオに設定] をタップ。「音楽再生時、TV 視聴時のデフォルトのオーディオが変更されました。」と表示された後、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示されたアイコンの左上に、緑色のチェックアイコンが表示されていれば設定は完了。

ペ어링した機器の確認方法

Bluetooth メニューの中心の携帯電話のアイコンと、Bluetooth 機器名が線でつながっていることで確認。

Bluetooth のオン / オフ方法

Bluetooth メニューの左下にある [On(Off)] をタップ

Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面の上部中央に Bluetooth のアイコンが表示される。
ヘッドセットと接続している時は、ヘッドホンのアイコンと組み合わせられて表示される。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

画面上の [ヘッドセット] のアイコンをタップして、Bluetooth ヘッドセットと本体の通話を切替。

SoftBank 941SC ペ어링方法

| | |
|-------|---------------|
| 携帯会社名 | SoftBank |
| 機種名 | SAMSUNG 941SC |

Bluetooth メニューへのたどり着き方

メニュー→[設定]→[外部接続]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 ペ어링したい Bluetooth 機器のアイコンをタップ。

液晶の下の一番に表示されている [デバイス検索] をタップ。しばらくすると、Bluetooth 機器の名前が表示されたアイコンが表示されるので、ペ어링したい Bluetooth 機器のアイコンをタップ。

STEP 3 パスキーを入力して、画面左下の [OK] をタップ。

液晶にダイヤルキーが表示されるので、30秒以内にパスキー「0000」を入力して、画面左下の [OK] をタップ。

STEP 4 画面中央の表示が切り替わる。

しばらくすると、「接続中…」→「サービスリストを取得中…」→「接続中…」→「ハンズフリーが接続されました」の順に画面中央の表示が切り替わる。

STEP 5 アイコンが水色の点線で結ばれているか確認。

画面中央の携帯電話のアイコンと、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示されたアイコンが、水色の点線で結ばれているのが確認できたら、設定は完了。

STEP 6 アイコンの左上に、緑色のチェックアイコンが表示されていれば設定は完了。

その後、オーディオをあらかじめ Bluetooth 機器から出力するように設定する場合は、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示されたアイコンをタップ。表示されるポップアップの一覧から [優先オーディオに設定] をタップ。「音楽再生時、TV 視聴時のデフォルトのオーディオが変更されました。」と表示された後、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示されたアイコンの左上に、緑色のチェックアイコンが表示されていれば設定は完了。

ペ어링した機器の確認方法

Bluetooth メニューの中心の携帯電話のアイコンと、Bluetooth 機器名が線でつながっていることで確認。

Bluetooth のオン / オフ方法

Bluetooth メニューの中心にある携帯電話のアイコンをタップ。
背景の縁が青の場合…ON、白の場合…OFF。

Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面の上部中央に Bluetooth のアイコンが表示される。
ヘッドセットと接続している時は、ヘッドホンのアイコンと組み合わせられて表示される。

ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

画面上の [ヘッドセットのアイコンをタップして、Bluetooth ヘッドセットと本体の通話を切替。

SoftBank X01SC ペ어링方法

| | |
|-------|---------------|
| 携帯会社名 | SoftBank |
| 機種名 | SAMSUNG X01SC |

Bluetooth メニューへのたどり着き方

スタート→[設定]→[接続]→[Bluetooth]

ペ어링方法

STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

STEP 2 「新しいデバイスの追加 ...」を選択。

画面左上に「Bluetooth デバイス」と表示される画面に変わるので、「新しいデバイスの追加 ...」を選択。

STEP 3 十字キー左上の「-」ボタンを押し、「次へ」を選択。

画面左上に「デバイスの追加」と表示される画面に変わり、画面上部に「Bluetooth デバイスを検索しています…」と表示される。その後、画面が切り替わるので、一覧からペ어링したい Bluetooth 機器にカーソルを合わせ、十字キー左上の「-」ボタンを押し、「次へ」を選択。

STEP 4 パスコードを入力し、「次へ」を選択。

画面左上に「パスコード」と表示される画面に変わるので、「0000」を入力して、十字キー左上の「-」ボタンを押し、「次へ」を選択。

STEP 5 「詳細設定」を選択。

画面左上に「追加されたデバイス」と表示される画面に変わるので、十字キー右上の「-」ボタンを押し、「詳細設定」を選択。

STEP 6 十字キー左上の「-」ボタンを押し、「次へ」を選択。

画面左上に「表示名」と表示される画面に変わるので、十字キー左上の「-」ボタンを押し、「次へ」を選択 (表示名を変えたい場合は、ここで変更します)。

STEP 7 十字キー左上の「-」ボタンを押し、「完了」を選択。

画面左上に「サービス」と表示される画面に変わる。接続したいプロファイルを確認した後、十字キー左上の「-」ボタンを押し、「完了」を選択。(ステレオヘッドセット利用の場合は「ワイヤレス ステレオ」に、ハンズフリー通話の場合は「ハンズフリー」にチェックがついていることを確認します。)

STEP 8 ペ어링した Bluetooth 機器の名前が表示されていれば、設定完了。

画面左上に「Bluetooth デバイス」と表示される画面に変わり、「新しいデバイスの追加 ...」の下にペ어링した Bluetooth 機器の名前が表示されていれば、設定完了。

| | |
|--------------|---|
| ペ어링した機器の確認方法 | Bluetooth メニューの「新しいデバイスの追加…」の下に機器名が記載されている。 |
|--------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| Bluetooth のオン / オフ方法 | Bluetooth メニューから [5 Bluetooth をオンにする] をタップ |
|----------------------|--|

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Bluetooth との接続を画面で確認する方法 | 画面の上部中央に Bluetooth のアイコンが表示される。 |
|--------------------------|---------------------------------|

| | |
|----------------------|---------------------------|
| ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法 | 「メニュー」→「5 ハンドフリーをオフ (オン)」 |
|----------------------|---------------------------|