

# SoftBank X02T ペ어링方法

携帯会社名	SoftBank
機種名	TOSHIBA X02T

Bluetooth メニューへのたどり着き方

スタート→[設定]→[Bluetooth]

## ペ어링方法

### STEP 1 携帯ユナイトをペ어링モードにする。

携帯ユナイトをペ어링モードにする。(マルチボタンを7秒間押す)

### STEP 2 「新しいデバイスの追加 ...」をタップ。

画面真ん中の四角の枠に表示されている「新しいデバイスの追加 ...」をタップ。

### STEP 3 ペ어링を行う Bluetooth 機器をタップした後、画面右下の「次へ」をタップ。

画面左上の Windows のアイコンの右側の「設定」の下に、青色の文字で「Bluetooth デバイスの選択」と書かれた画面に切り替わる。しばらくして画面真ん中の四角の枠に表示される一覧から、ペ어링を行う Bluetooth 機器をタップした後、画面右下の「次へ」をタップ。

### STEP 4 画面右下の「詳細設定」をタップ。

しばらくすると、画面の下の方に「デバイスが追加されました『PocketPC が [ペ어링した Bluetooth 機器名] に接続されました。』」と表示されるので、画面右下の「詳細設定」をタップ。

### STEP 5 画面が切り替わる。

画面左上の Windows のアイコンの右側の「設定」の下に、青色の文字で「パートナーシップの設定」と書かれた画面に切り替わる。「このデバイスから使用するサービスを選択します。」の下の枠の中に、利用したいプロファイルと、その横にチェック (v) が付いていることを確認。(ハンズフリー通話をする場合…「ハンズフリー」、音楽の視聴・操作をする場合「ワイヤレス ステレオ」)

### STEP 6 ペ어링した Bluetooth 機器名が表示されていれば、設定は完了。

画面右下の「保存」をタップ。その後、画面左上の Windows のアイコンの右側の「設定」の下、青色の文字で「Bluetooth」と書かれた画面の真ん中の四角の枠に表示されている「接続済み」の下に、ペ어링した Bluetooth 機器名が表示されていれば、設定は完了。

#### ペ어링した機器の確認方法

Bluetooth メニューの接続済みの下に機器名が表示される

#### Bluetooth のオン / オフ方法

Bluetooth メニューの画面下部の [モード] タブををタップ→[Bluetooth をオンにする] のチェックを入れる。

#### Bluetooth との接続を画面で確認する方法

画面最上部の中央右寄りに、音符とヘッドセットのマークが組み合わさったアイコンが表示されます。

#### ヘッドセットと本体との通話の切り替え方法

通話中の画面に表示される [スピーカー オフ] (または [スピーカー オン]) をタップすることで、本体とヘッドセットの切替ができます。