




-Windows Vista&7版-

Aventa3顧客データバックアップ方法

Aventa3の顧客データのあるフォルダは初期設定で「非表示」になっており、バックアップや復元を行う間だけ、これを解除する必要があります。

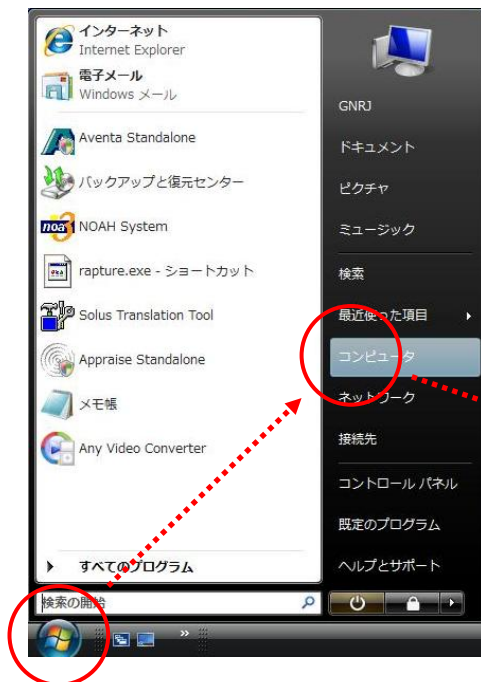

- ① スタートメニューからコンピュータを開きます。
- ② メニューバーから「ツール (T)」→「フォルダオプション (O)」を開きます。

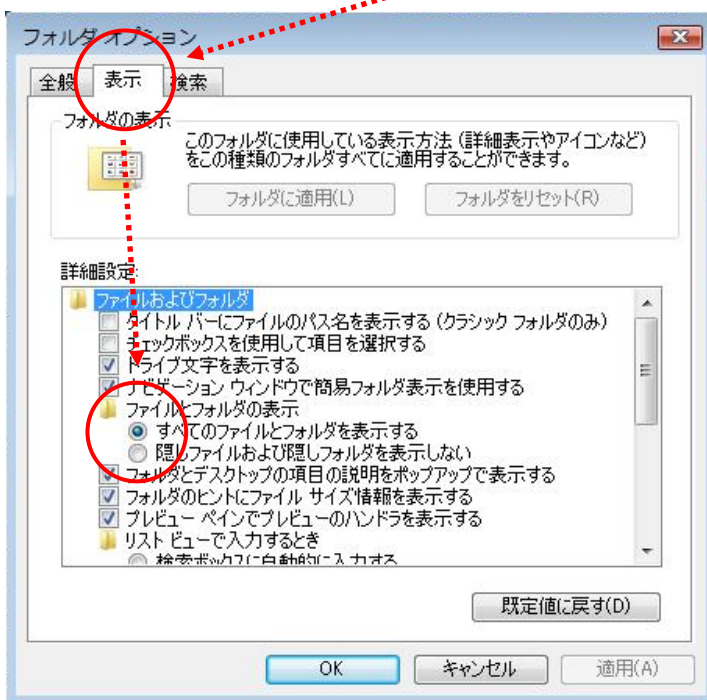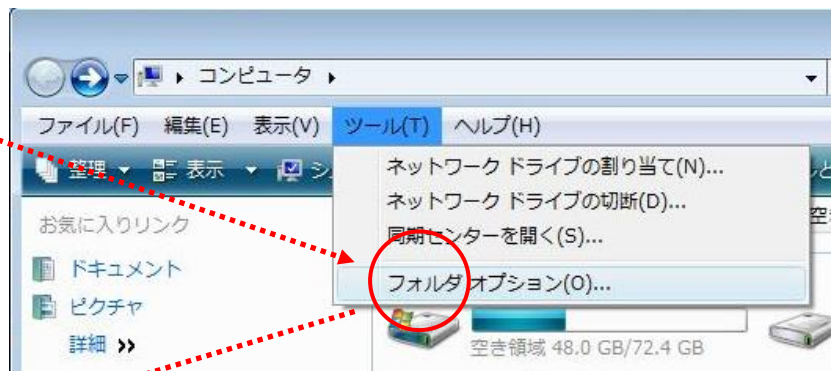

- ③ フォルダオプションのウィンドウが開くので、「表示」のタブを開きます。
- ④ 「ファイルとフォルダの表示」の設定を「すべてのファイルとフォルダを表示する」に変更します。


※この状態では、パソコンの動作に必要なシステムファイルも移動や削除が可能になっていますので、注意が必要です。

顧客データのバックアップ後は、同じ要領でこれを再設定して下さい。



(「隠しファイルおよび隠しフォルダを表示しない」に戻す)

顧客データの場所

顧客データは、以下の場所に保存されています。
このフォルダを、他のメディア等へコピーして下さい。

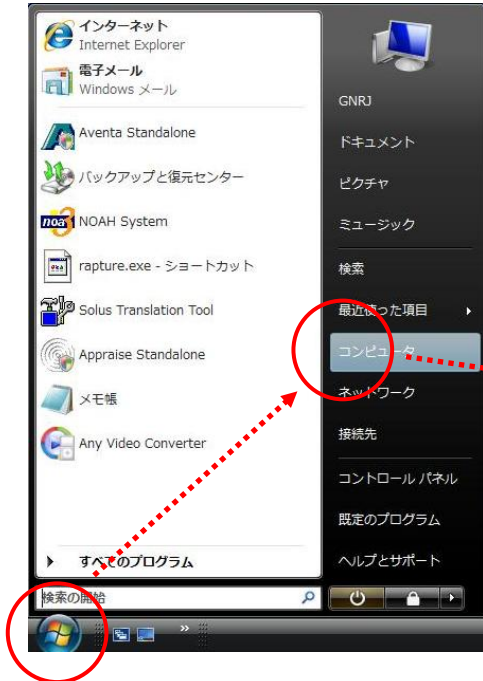

コンピュータ → OS(C) → ProgramData → ReSound → Aventa → 3
※Windows XP とはデータの保管場所が異なります。

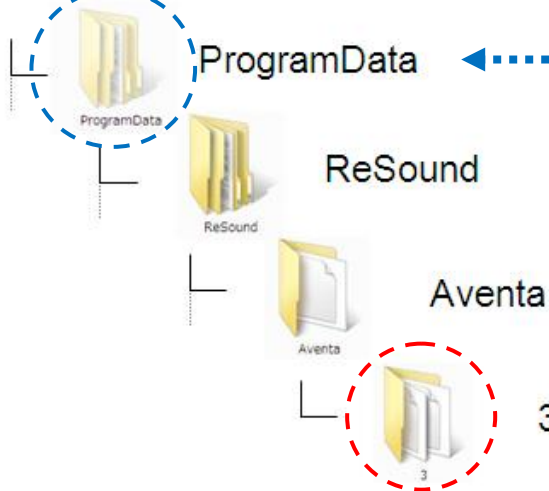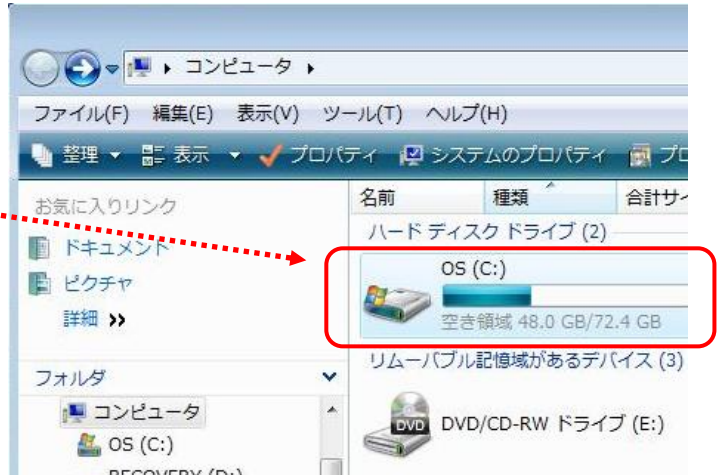

このフォルダが表示されない場合、
前の①～④の手順が完了していない
可能性があります。

このフォルダごと別のメディアに
コピーして下さい。

- 復元の際は、元々あった場所に上書きコピーして下さい。
- 異なるパソコン間で移行する場合は、必ず双方の Aventa3 を同じバージョンに揃えて下さい。

以上

ジーエヌリサウンドジャパン株式会社
☎ 0120-921-310