




Aventa 3 顧客データバックアップ方法

Aventa3より顧客データのあるフォルダは初期設定で「非表示」になっており、バックアップや復元を行う間だけ、これを解除する必要があります。

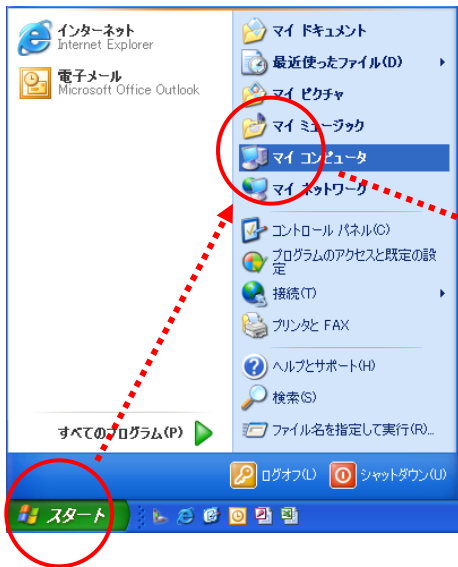

① スタートメニューからマイコンピュータを開きます。

② メニューバーから「ツール(T)」→「フォルダオプション(O)」を開きます。

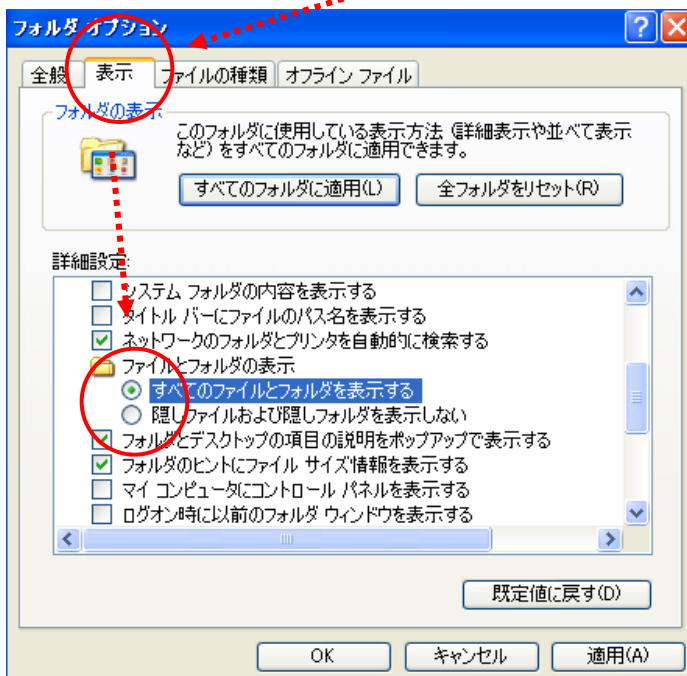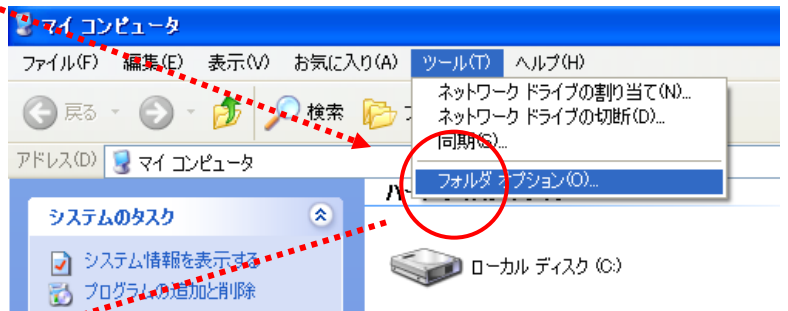

③ フォルダ オプションのウィンドウが開くので、「表示」タブを開きます。

④ 「ファイルとフォルダの表示」の設定を「すべてのファイルとフォルダを表示する」に変更します。

※この状態では、パソコンの動作に必要なシステムファイルも移動や削除が可能になっていますので、注意が必要です。



顧客データのバックアップ後は、同じ要領でこれを再設定して下さい。
(「隠しファイルおよび隠しフォルダを表示しない」に戻す)

ジーエヌリサウンドジャパン株式会社
☎ 0120-921-310

顧客データの場所

顧客データは、以下の場所に保存されています。このフォルダを、他のメディア等へコピーしてください。

マイコンピュータ→ローカルディスク (C:) → Documents and Settings → All Users → Application Data → ReSound → Aventa → 3
 ※Windows Vista&7では保管場所が異なります。

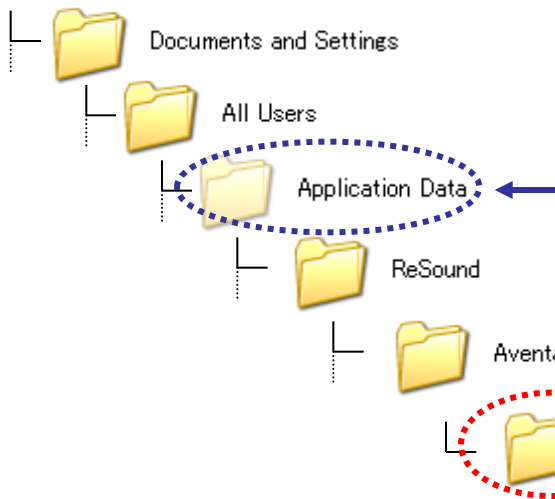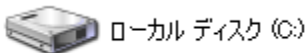

このフォルダが表示されない場合、前の①～④の手順が完了していない可能性があります。

このフォルダごと別のメディアにコピーしてください。

- 復元の際は、元々あった場所に上書きコピーしてください。
- 異なるパソコン間で移行する場合は、双方のAventa3のバージョンを最新にしておいてください。

ジーエヌリサウンドジャパン株式会社
 ☎ 0120-921-310