

■ 種類の確認

ノーマルパワー用：プチモールド



ノーマルパワー用
レシーバー



ハイパワー用：イヤモールド



ハイパワー用
レシーバー



■ 装着の仕方

* プチモールド・イヤモールド共通。
写真はプチモールドの場合。



①RIE 用イヤモールドのテグスと、レシーバーの番号が同じ方向を向くようにして装着します。奥までしっかりと差し込んでください。

* プチモールドは奥まで入ると「パチンツ」と音がします。

②装着後、レシーバーチューブを軽く引っ張り、レシーバーが RIE 用イヤモールドから抜けてこないことを確認してください。



※取り外しは販売店様ではできませんのでご注意ください。