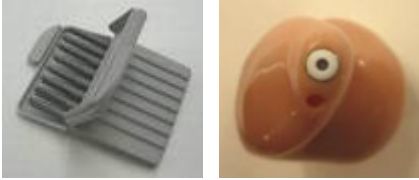


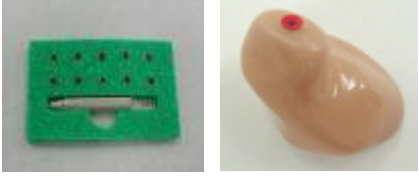


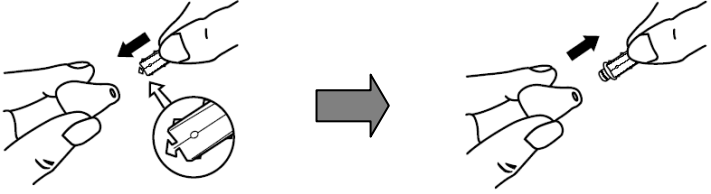
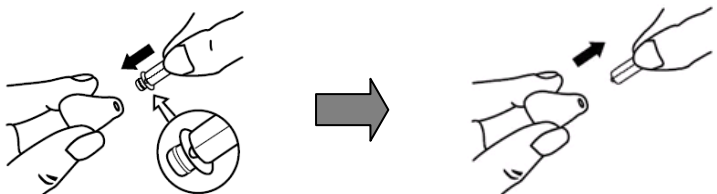

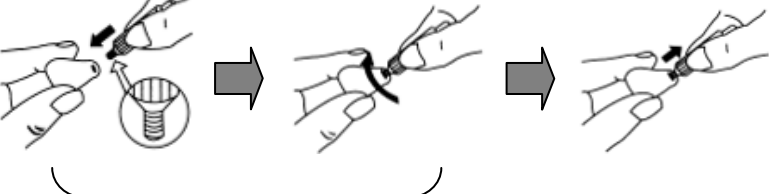


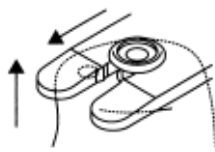
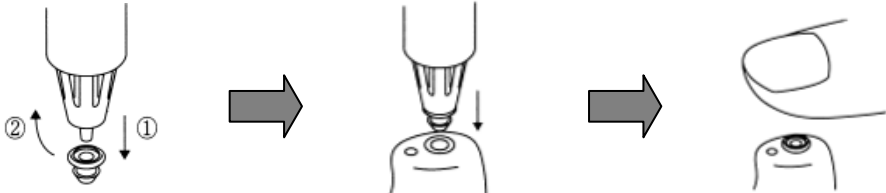


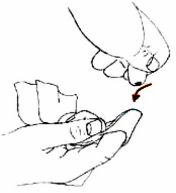
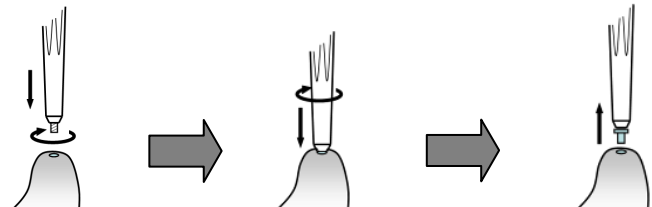
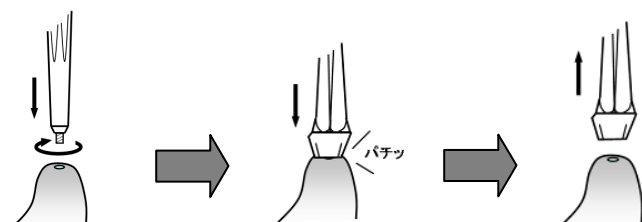
【 耳垢ガードの使い方 】


お客様の耳垢ガード ※口にチェックを入れて下さい			
<input type="checkbox"/> セルストップ		<input type="checkbox"/> C-バリア	
<input type="checkbox"/> HF-3		<input type="checkbox"/> ベル型(左) ベルトップ(右)	
<input type="checkbox"/> ニューワック スガード		<input type="checkbox"/> 開閉式	


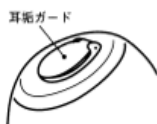
セルストップ		<お手入れについて> 音の出口を下にし、付属のブラシでゴミを取り除いてください。 	
【 取り外し方 】		【 取り付け方 】	
 <p>① 付属のホルダーの先端（取り外しフック側）を補聴器の耳垢ガードに差し込みます。</p> <p>② そのまま真っ直ぐに、耳垢ガードごと引き抜きます。</p>		 <p>① ホルダーの反対側の先端（耳垢ガード側）を補聴器の先端に押し込みます。</p> <p>② ホルダーをそのまま真っ直ぐに引き抜きます。</p>	

HF-3		<お手入れの仕方> 音の出口を下にし、付属のブラシでゴミを取り除いてください。 	
【 取り外し方 】		【 取り付け方 】	
 <p>① 付属治具の金属の先端部を耳垢ガードに差し込み、時計回りに廻してください。</p> <p>② そのまま耳垢ガードごと抜き取ります。</p>		 <p>① 治具の反対側の先端を耳垢ガードの窓に合わせ、差し込んでください。</p> <p>② 治具を新しい耳垢ガードごと引き上げます。</p> <p>③ 補聴器の先端に押し込みます。</p>	

<h2>ニューワックスガード</h2>		<p><お手入れの仕方> 音の出口を下にし、付属のブラシでゴミを取り除いてください。</p> 
【 取り外し方 】	【 取り付け方 】	
 <p>補聴器と耳垢ガードの間に治具を滑り込ませ、上に押し上げてください。</p>	 <ol style="list-style-type: none"> ① 治具の先を新しい耳垢ガードの穴に差し込み、すくい上げるようにしてケースから取り外してください。 ② 補聴器の音の出口に耳垢ガードを差し込んでください。 ③ 指先で真直ぐ耳垢ガードを根元までしっかりと押し込んでください。 	

<h2>C-バリア</h2>		<p><お手入れの仕方> 付属のクロスなどで、一方向にやさしくなでるように力を加えずに拭いてください。 ※ブラシは絶対に使わないでください。</p> 
【 取り外し方 】	【 取り付け方 】	
 <ol style="list-style-type: none"> ① ホルダーの細かい方の先端を時計回りに差し込んでください。 ② 先端のネジ部が隠れるまでしっかり回してください。 ③ ゆっくりと引き上げてください。 	 <ol style="list-style-type: none"> ① 新しいC-バリアを真直ぐ差し込んでください。 ② 少し強めに押し込むと、「パチッ」と音がしてはめ込まれます。 ③ ゆっくりとホルダーを引き上げてください。 	

<h2>ベル型・ベルトップ</h2>
<p><お手入れの仕方> 音の出口を下にし、付属のブラシでゴミを取り除いてください。</p> 
<p>※耳垢ガードの交換は必要ありません。</p>

<h2>開閉式</h2>
<p><お手入れの仕方> 耳垢ガードを下に向けて右図のように開いてください。 音の出口周辺やプレートの裏などの耳垢を矢印のように外側に向かって掃き出してください。</p> 
<p>※耳垢ガードの交換は必要ありません。 (プレートを閉じた状態でご使用ください)</p> 

<取扱い上の注意点>

- (1) 一度使用した耳垢ガードは再利用しないでください。外耳道内に脱落する危険性があります。
- (2) 使用する前に耳垢ガードが正しく取付けられているか確認してください。正しく取付けられていない状態で使用すると外耳道内で外れる危険性があります。
- (3) 万一耳垢ガードが外耳道内に脱落した場合は、ただちに医師へご相談ください。

製造販売元

ジーエヌリサウンドジャパン株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3
MMパークビル8F

☎0120-921-310 (TEL)
0120-636-392 (FAX)